

医04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

滅菌トランスーム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品は、パット状に成形した脱脂綿と吸水シートを積層し、表面（脱脂綿）側をガーゼで覆い、裏面（吸水シート）側にラミネート防水紙を熱溶着したものである。

本品は、脱脂綿の吸収能力によって、適用部位の液の吸収又は止血を行うものである。

吸水紙と吸水性樹脂による吸水シートは、脱脂綿の保水能力を補助する。

本品は、電子線滅菌してある。

【使用目的又は効果】

液の吸収、止血

【使用方法等】

本品を適用部位に接触させ、液の吸収又は止血に用いる。

【使用上の注意】

袋が開封、破損又は汚損している場合は、滅菌品として使用しないこと。

開封後は、直ちに使用すること。

使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限〔自己認証（自社データ）による〕を、袋及び外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

竹下製薬株式会社 新潟工場

*住重アテックス株式会社 つくばセンター

*住重アテックス株式会社 関西センター

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 フリーダイヤル 0120-094-315