

アドール[®]E



adole


胸部固定帯

非伸縮素材(肌側綿パイル)

伸縮素材(メッシュ)

取り外し用ストラップ

面ファスナー

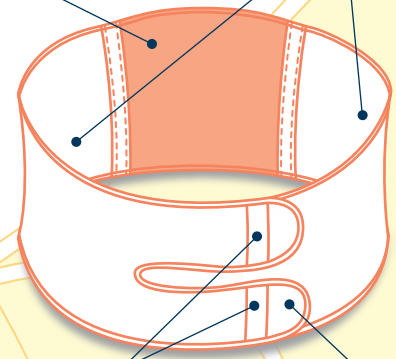

● ● 特長 ● ●

- 面ファスナー留め部分が上・下セパレートになっているので、固定力を自在に調節できます。
- 伸縮部分には強力弾性素材を採用しています。
- 非伸縮部分の肌側にはソフトな綿素材を採用しています。
- 便利な取り外し用ストラップ付き。少ない力でも取り外しできます。

● ● 使用上の注意 ● ●

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は胸部固定以外の用途には使用しないでください。
- 本品の使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し、医師に相談してください。

● ● 洗濯方法 ● ●


- 水の温度は30℃を限度とし、弱く手洗いをしてください。(洗濯機のご使用は避けてください)
- 洗剤は中性洗剤をご使用ください。● 面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。● 塩素系漂白剤等による漂白はできません。
- アイロン、ドライクリーニングは避けてください。● 日陰でつり干しをしてください。

商品番号	規格(胸廻り)	販売単位	JANCODE
033052	S 70cm ~ 85cm	1枚	4958995330526
033053	M 85cm ~ 100cm	1枚	4958995330533
033054	L 100cm ~ 120cm	1枚	4958995330540
033055	L L 120cm ~ 140cm	1枚	4958995330557

※ケース単位…5枚入 ・ 定価…オープン

【サイズの選び方】

計測部位目安

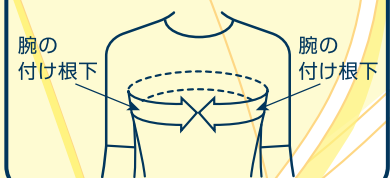

発売元



株式会社 竹虎[®]

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

第一営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル 10F
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

第二営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江城南口第二ビル 5F
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (6155) 7073

取扱店