

外反母趾サポート



クロスガイダー[®]

特長


- 外反母趾の矯正用サポーターです。
- ソフトな固定で、面ファスナーによる簡単着脱です。




※右用の着用例




装着方法 (例) 右用

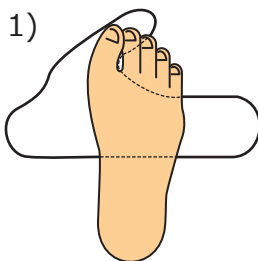


1) 上図のように足を置きます。

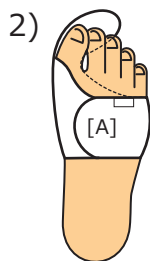

2) 甲部分のベルト [A] を面ファスナーで留めます。

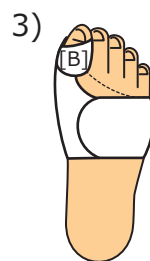

3) 母趾部分のベルト [B] を、母趾を内反させるように面ファスナーで留めます。

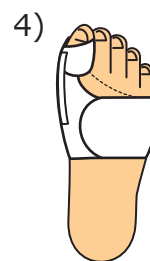

4) 補助テープにより、矯正力を調整してください。

規格

・定価 [税別] … 1,500 円

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
037610	右用	1 枚	4958995376104
037611	左用	1 枚	4958995376111

発売元



株式会社 **竹虎**[®]

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

第一営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル 10F
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

第二営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (6155) 7073

取扱店