

N-95

結核菌にも対応可能な高性能マスクです。

- 米国 NIOSH 規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95 対応)
- フェイスラインに密着し、高い捕集効果を発揮します。

N-95 とは…

CDC (米国疾病予防管理センター) が医療施設における結核菌の感染対策としてガイドラインを策定した時、マスクの性能として用いたのが NIOSH (米国労働安全研究所) の N-95 マスクです。もともと N-95 マスクは粉塵など労働者用のマスクとして NIOSH によって規定されていたものです。



サージマスク N-95 (折りたたみ式)

50 枚入 オープン価格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
076073	ホワイト M 7.5cm×24.0cm 50 枚入	1 箱	4958995760736	6 箱

※サイズは折りたたんだ状態での寸法です。



防ぎマスク® N-95 1 枚入 自販機用

1 枚入 オープン価格

※この商品のメーカー出荷はケース単位です。

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
076086	ホワイト 7.5cm×24.0cm 1 枚入	1 箱	4958995760866	25 箱

※サイズは折りたたんだ状態での寸法です。



専用自動販売機(手動式)



・横幅 342mm ・奥行 220mm
 ・高さ 780mm ・重量 18kg
 ※価格や設置、ボックス台に関する詳細および修理や鍵の交換については取扱店または担当営業へお問合せください。

N-95 (折りたたみ式・自販機用) 装着方法



1 ノーズブリッジ側を上にし、マスクを上下に開きます。



2 ノーズブリッジを鼻に合うように軽く曲げます。



3 2本のゴムを指で分けて両方とも持ちます。



4 マスク下側をあごに掛け2本のゴムの中央を持ち頭の後ろへ持っていきます。



5 マスク上側ゴムを頭頂部に、下側ゴムを首に固定します。



6 隙間ができないようにしっかりとノーズブリッジを顔に合わせます。



7 最後にマスクが密着しているか確認します。まず、両手でマスクを覆い、息を吐き出し、空気のもれをチェックして密着の良い状態にマスクを合わせます。

発売元



株式会社 竹虎®

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

第一営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル 10F
 TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

第二営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
 TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (6155) 7073

取扱店