

自由に切っても曲げても使える高機能サージカルパッド モイストポリリーゼ[®]



未滅菌

再使用禁止

一般医療機器

手術用被覆・保護材 (JMDNコード34654000)
熱傷被覆・保護材 (JMDNコード11322101)

・販売名：モイストポリリーゼ
・届出番号：27B2X00217PMTK00
・製造販売元：株式会社 瑞光メディカル
及び製造元 大阪府摂津市鳥飼上4-3-50


商品番号	規格	JANCODE
046913	P1 (200mm × 250mm) 3枚入	4958995469134

※ケース単位：12袋入




[特長]

- 傷口を乾燥させにくく、やさしく保護します。
- 傷口から出る過剰な血液、体液を吸収します。
- 垂直方向に吸収するため、傷口以外の皮膚がムレにくくなります。
- 傷口に貼り付きにくいいため、はがす時の痛みが大幅に軽減されます。
- 薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、傷口を圧迫しません。
- 傷口の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。

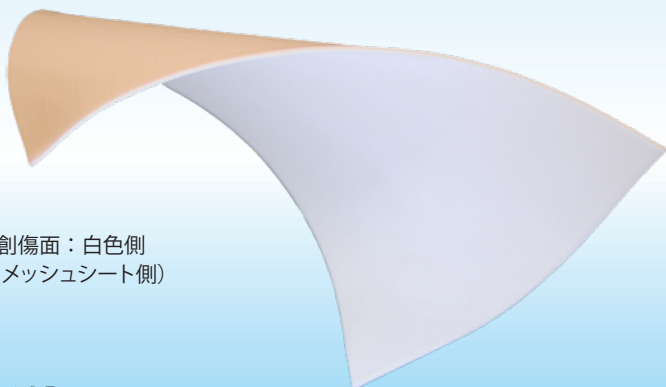

・創傷面：白色側
(メッシュシート側)

滲出液のドレナージ*機構

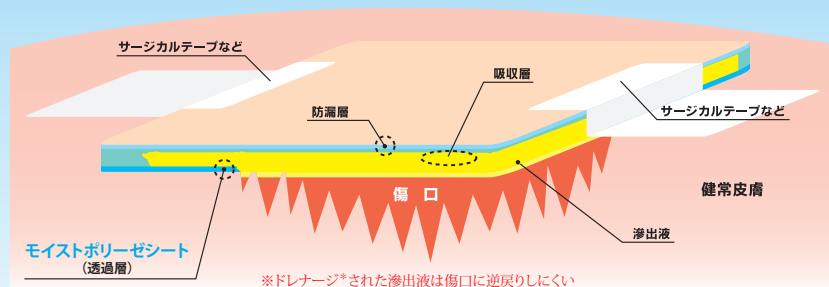

※ドレナージ*された滲出液は傷口に逆戻りしにくい


*ドレナージ…傷口から出る過剰な滲出液を吸収すること

自由にカット可能!




※カット、取り扱いの際は使いすての手袋を着用する事をおすすめします。


[使用方法]

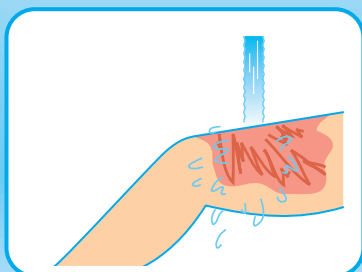

1. 傷口を水道水または消毒液等で十分に洗浄し、汚れや異物を取り除いてください。消毒液を使用した場合は、傷口に消毒液が残らないように水道水等で十分に洗い流してください。(本品を交換する際も同様に傷口を洗浄してください。)

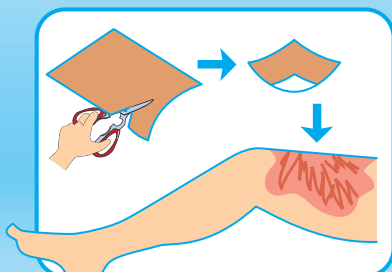

2. モイストポリリーゼを傷口よりもひと回り大きくカットし、メッシュシート側(白色)を傷口にあて、密着させます。(肌色フィルムははがさずそのまま使います。)

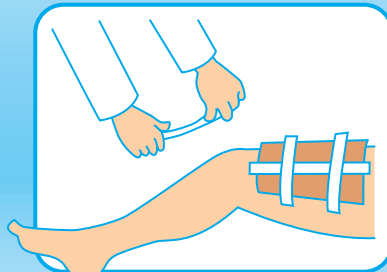

3. モイストポリリーゼが傷口からずれないように包帯、ネットまたはテープなどで固定してください。テープ等で固定する場合は、モイストポリリーゼの周囲が一部開放状態となるようにとめてください。

4. 通常、滲出液が本品周囲からもれ出すまで連続でご使用いただけますが、早め早めの交換をおすすめします。(少なくとも1日1回の交換をおすすめします。) また、万が一周囲からもれ出した滲出液で衣類が汚れる事が気になる場合は、本品の上からガーゼ等で覆ってください。

ムレ・ふやけ・かぶれを解決! 《モイストポリリーゼ》は
湿潤療法の考えに基づきながら傷を保護します。

『早く』・『きれい』に傷が治る


『痛くない』治療方法＝湿潤療法をしてみませんか？

【湿潤療法】って？

傷口から出る透明なジュクジュク(滲出液)には、
傷口の再生を促す働きがあります。

- 滲出液には「細胞成長因子」という傷を早く治す大切な成分が含まれています。
- 傷口の細胞を活性化させて、皮膚組織を再生させれば傷は早く治ります。

【湿潤療法のイメージ図】

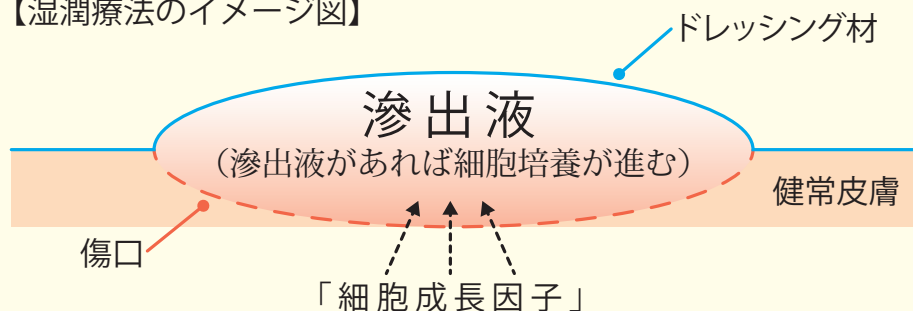

- × 傷口をガーゼ等で覆ってしまうと、滲出液と共に細胞成長因子も吸収してしまうため、治りが遅くなります。
- × 傷口が乾くことでガーゼにくっついてしまい(固着)、ガーゼを交換する際に痛みを伴います。
- × くっついたガーゼをはがす時に傷口に大きなダメージを与えることがあります。

発売元



株式会社 **竹虎**®
メディカル事業部

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

取扱店