

# ソフラ® あごバンテージ

ワンタッチ顎バンド (1枚入)

顎関節の脱臼時に  
顎を気持ちよく固定



着用方法は  
こちらから  
動画で確認  
できます。



株式会社 竹虎®

URL <http://taketora-web.com/>  
商品に関するお問合せ先 0120-094-315  
(9:00~17:00 月~金 ただし祝祭日を除く)

## 使用上の注意


- ・ご使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- ・使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相談してください。
- ・強く巻きすぎると血行が悪くなるおそれがありますので、ご注意ください。
- ・面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。
- ・呼吸がしにくい場合がありますので、サイズを適宜確認のうえご使用ください。

## サイズ一覧

規格(参考サイズ)	
S (首廻り 35 cm / 顔廻り 60~65cm)	
M (首廻り 37.5cm / 顔廻り 65~70cm)	
L (首廻り 40cm / 顔廻り 70~75cm)	

※値がぎりぎりの場合は1サイズ上をおすすめします

## 計測部位

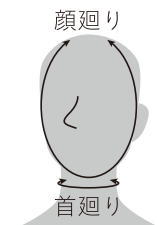


## 主な素材

- ・綿
- ・ナイロン
- ・ポリエステル
- ・ポリウレタン

## 洗濯方法

- ・面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。
- ・水の温度は40℃を限度とし、手洗いをしてください。  
(洗濯機のご使用は避けてください。)
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。漂白剤による漂白はできません。
- ・タンブラー乾燥は製品変形、劣化のもとになりますのでおやめください。
- ・日陰でつり干しをしてください。
- ・アイロン、ドライクリーニングは避けてください。

## 着用方法

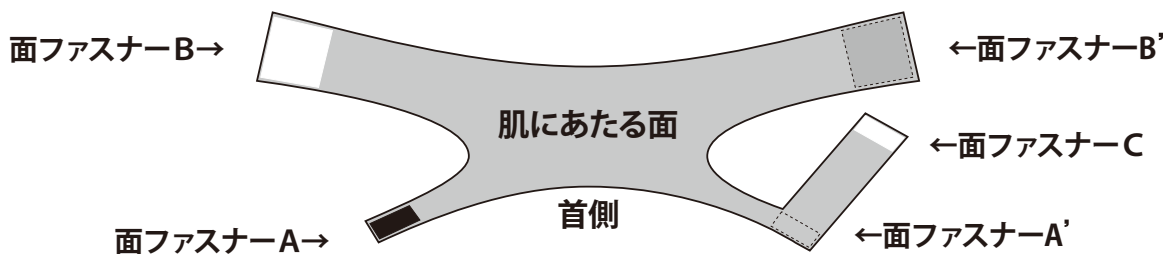


1



1. 面ファスナー-AとA'の両端を持ち、首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。(左手側のAが上になります)

2

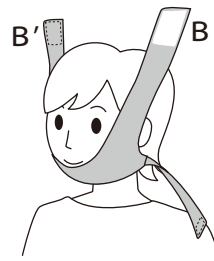


2. 面ファスナー-BとB'の両端を持ち上げ、あごにフィットするまで引き上げ、頭の上でとめます。(左手側のBが上になります)

3



3. 面ファスナー-Cを持ち上げ、面ファスナー-BとB'の上でとめれば装着完了です。

\*

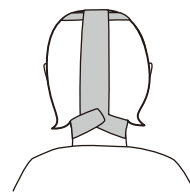

\*後ろから見た図  
固定力を微調整してください。