

お得意様各位

## 天井走行リフト “かるがる<sup>®</sup>” ハンドコントロールご使用上の注意

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

誤ったご使用・操作により、製品の不具合を引き起こす可能性がありますので、下記の使用方法に沿ってご使用（操作）いただきますよう、お願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 対象商品 : 520020 かるがるV  
510050 かるがるプチV  
510070 かるがるプチV標準セット  
530000 かるがるサテライト  
510060 かるがるサテライト標準セット

2. ご使用方法について

ハンドコントロールについている、**緊急降下ボタンは緊急時に使用するためのボタン**となっています。このボタンを多用しますと本体の不具合を引き起こす可能性がございます。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みになり、誤ったご使用（操作）をしないように十分ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせいただきますようお願いいたします。



以上

ご不明な点は下記担当営業部署までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

■東日本エリア：045-680-0390 ■西日本エリア：06-6386-7317