

医05 副木  
一般医療機器 成形副木 35354000

## ガードラーSP II

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、本体にナイロン、ポリエステル、ウレタンを使用した伸展位  
膝関節サポーターである。  
膝関節を固定することにより膝関節損傷部への負担を軽減する。

### 【使用目的又は効果】


損傷した膝関節部位を固定（保護、安静保持）するために用いる。

### 【使用方法等】


- 1) 商品タグを上部とし、膝蓋骨に『窓位置』を合わせ後ろから覆う。
- 2) 面ファスナーベルトを、図の①～⑥の番号順にバックルを通して留める。

※本品は、左右兼用です。

1)

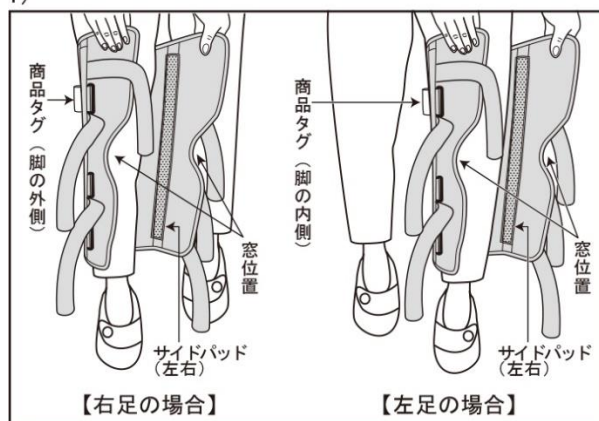

2)

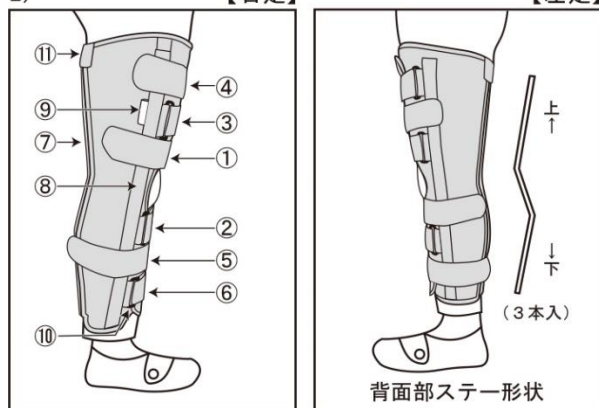

- ①～⑥：面ファスナーベルト  
⑦：背面部ステー 3本  
⑧：側面部ステー左右 各1本  
⑨：商品タグ  
⑩：バックル左右 各3個  
⑪：ステーカバー

### 【使用上の注意】

1. 使用注意：
  - 1) 使用に際しては、必ず医師の指示に従うこと。
  - 2) 膝関節サポート以外の用途に使用しないこと。
  - 3) 使用中に異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談すること。
2. 重要な基本的注意：
  - 1) 面ファスナーを着衣に引っかけないように注意すること。
  - 2) 背面部ステーカバーは、しっかり留めること。
  - 3) ステーを再度入れ直す際は、ステーの種類、各ステーの上下、裏表に注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター  
I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd (台湾)

発売元 株式会社 竹虎  
商品に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-094-315