

セーフミトン®Ⅲ

2層構造のパッドを採用 甲側がメッシュで高い通気性

- ご本人では開けにくい
アイデアホックを使用
・自傷行為や抜管行為から身体を守ります。
- 手の状態の確認ができ
通気性の良い
甲側メッシュ生地
- 厚さ約4.7cmのパッドで
ものがつかみにくい



左右兼用


フリー

小児用

装着方法

※本品は左右兼用です。

親指と小指部分の仕切り（小児用は仕切りがありません）

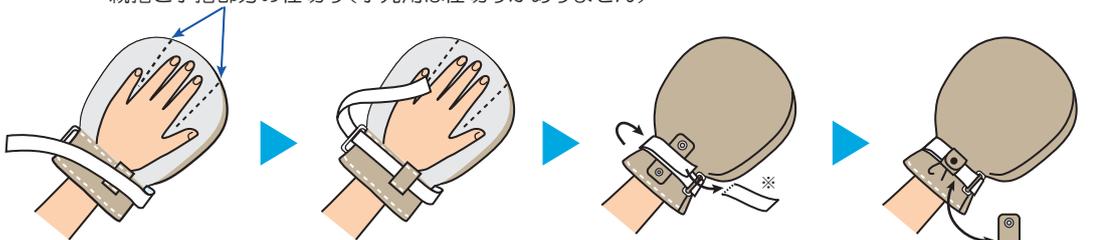

1 手袋に片手を挿入します。

- メッシュ側が手の甲側になるように装着します。
- フリー：仕切り部分両端に親指、小指のみがくるように挿入します。

2 手首ベルト（固定用ベルト）をベルト通しに入れ、プラスチックベルト通しに差し込みます。

3 逆方向に折り返し、しっかりと締め、面ファスナーで留めます。

- ※余分な面ファスナーは切って、長さを調節してください。

4 手のひら側のアイデアホック付ストッパーを留めます。

- ※ストッパーは取り外し可能です。

注意



装着後、手が手袋から簡単に抜けないことを確認してください。

適応サイズ



- 手首廻り
フリー：13cm～20cm
小児用：9cm～14cm
- 手の長さ
フリー：14cm～19cm
小児用：～14cm

利用者本人や介助者などの生命又は身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。

“セーフミトン®Ⅲ”は、自傷行為や抜管行為等を防ぐ事を目的に開発された手袋です。ミトンの中で手が回りにくく、パッドの効果により物が掴みにくい構造、そしてご本人では外しにくいアイデアホックを採用することにより、これらの行為に対応します。ご使用の際は、ご家族や専門家とご相談の上、正しくご使用ください。

ご使用者の症状や状況に応じ、適宜安全をご確認の上、適切なケアをお願いいたします。

つかめない

2層構造のパッドと、手袋内部で手が回転しにくい商品設計(親指と小指部分の仕切り)により、物がつかみにくい。(小児用は仕切りがありません)

2層構造のパッド

内側：緩衝材(手の保護)としての効果とつかみにくさを高めた厚みです。

外側：物をつかもうとした際に、内側パッドにかかった力を分散します。

高い視認性

メッシュ素材で、手袋を外すことなく手の状態を確認可能。

快適装着

メッシュと2層構造のパッドは通気性が高く、ムシにくい。本体生地は、汗をかいても不快に感じにくい素材で、快適な使用感。

手が動かせる

立体裁断のメッシュとパッドのクッション性により、手の動きを妨げない余裕のある内部。

外せない

面ファスナー留で、使用者の手首に合わせて調節可能な手首ベルト。ストッパーをかぶせアイデアホックで留める、使用者本人では手袋を外しにくい構造。

ご本人では開けにくいアイデアホックを使用したストッパー。ミトン本体との面ファスナー接着。交換対応可能。

交換用パーツ



替えアイデアホック付ストッパー



ブラインドストッパー



素 材

本体生地：ポリエステル、綿
 メッシュ地：ポリエステル
 芯材：ポリウレタン、ポリエステル
 ベルト：ナイロン
 面ファスナー：ナイロン
 アイデアホック：ステンレス

規 格

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE	ケース単位
041056	フリー	1 双	7,260 円(税込) 6,600円(税別)	4958995410563	6 箱
041046	小児用	1 双	7,260 円(税込) 6,600円(税別)	4958995410464	—

※小児用対象目安：3歳～(手の小さな成人)

交換用パーツ (フリー、小児用共通)

041057	替えアイデアホック付ストッパー	1 個	913 円(税込) 830 円(税別)	4958995410570	
041058	ブラインドストッパー	1 個	913 円(税込) 830 円(税別)	4958995410587	



フリー(1双入)



小児用(1双入)



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 縣メディアビジネスセンター8F
 TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
 TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店