
オスグッドバンド (パッド付膝バンド)

ガードラー。OSバンド





子供でも簡単装着 オスグッド対応の膝バンド

- ●適度な固定力で動きやすい
- シリコーン製のパッドで効果的に圧迫
- スマートなカラー&デザイン

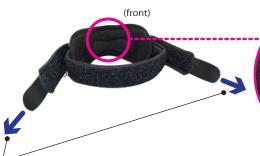



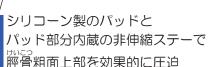

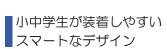

小学生から中学生まで、1本で 幅広く対応可能なフリーサイズ

調整ベルトを左右方向に引っ張って 固定。固定力の微調整が簡単

汚れが目立ちにくく スポーティーなブラック

装着方法





1 膝頭と下の骨(脛骨粗面) の間にパッドを当てます。



2 バンドがゆるまない程度に 折り返したバンドを左右に 引っ張り、膝裏で留めます。

※きつく締めすぎないように注意してください。

バンドの装着は運動時に行ってください



3 膝を曲げてみて膝裏に痛みが ないかを確認してください。

※痛みがある場合にはパッドとベルトの 位置を調整してください。

材 素

ナイロン フォーム シリコーン ポリウレタン ポリエチレン





2,475円(税込)2,250円(税別)

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
037390	フリー 適応範囲 27cm ~ 46cm	1本	4958995373905

・この商品のメーカー出荷はケース単位(5本入)です



株式竹虎

https://www.taketora-web.com/

27~46cm

【メディカル事業部】

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 熊メティア・ビシネススセンタ-8F 東日本 TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101 取扱店