

## ドルフソフト

### 【形状、構造及び原理等】

- \*\* 本品は、芯材にソフトウレタンを使用した頸椎固定用シーネである。  
頸部を固定することにより頸椎損傷部への負担を軽減する。

### 【使用目的又は効果】

損傷した頸椎部位を固定（保護、安静保持）するために用いる。

### \*\* 【使用方法等】

[1号]

- カバーを外し、アジャスターを本体から取り外す。
- 取り外したアジャスターで高さを調節して本体に付ける。
- カバーを本体とアジャスターにかぶせる。
- 上下を確認し、本体の凹んでいる部分に顎をあてる。
- 肌側/外側を確認する。  
(商品タグの付いている面を外側にする)
- 首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

[2号、3号]

- 上下を確認し、本体の凹んでいる部分に顎をあてる。
- 肌側/外側を確認する。  
(商品タグの付いている面を外側にする)
- 首に巻き、首の後ろで面ファスナーを留める。

### 【使用上の注意】

- ご使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
  - 頸椎固定以外の用途には、使用しないでください。
  - 本品は頸椎の保護、安静保持を目的としていますが、ご使用状況やご使用者の健康状態によって必ずしも完全に保護できるわけではありません。
  - ご使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相談してください。
  - ご使用の際は、面ファスナーが直接肌にあたらないように装着してください。
- \*\* ・面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。  
\*\* ・カバーを必ずご使用ください。(本体の洗濯は避けてください)

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光、火気及び高温を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

商品に関するお問合せ先 0120-094-315