

膝関節バンド(ステータ付き)

主な用途：変形性膝関節のサポーターなど




ガードラー®OA

特許第 5292353 号

簡単・スリムに装着 長く使えてしっかりサポート

- 巻き付けるだけで簡単装着
ソフトな伸縮性生地で快適なフィット感
- 2本のステータと上下ベルトの
巻きつけでしっかり固定
- 自由な位置で接着でき調節しやすい、
左右兼用

外側全面が面ファスナーで
留められる縦横伸縮素材
固定力を自由に調節可能

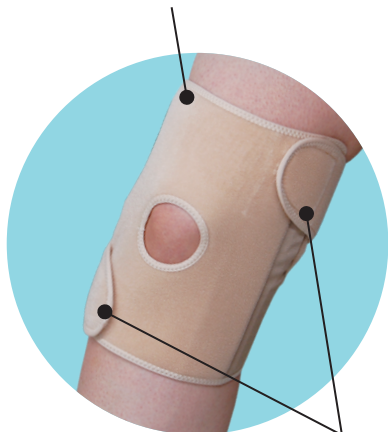

ベージュ

膝を上下に留める
ラッピング効果により
重心動揺を抑えて
膝の安定をサポート




ブラック



ベルトが膝裏にかからず
ムシにくい

くるっと巻きつけるだけで
簡単に装着できるZ型

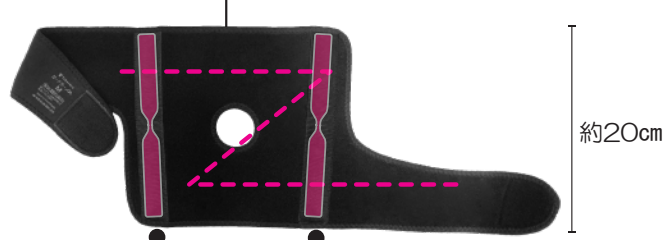


約20cm

左右2本のステータ（樹脂製）が
膝関節を効果的に固定

本体

(肌側)

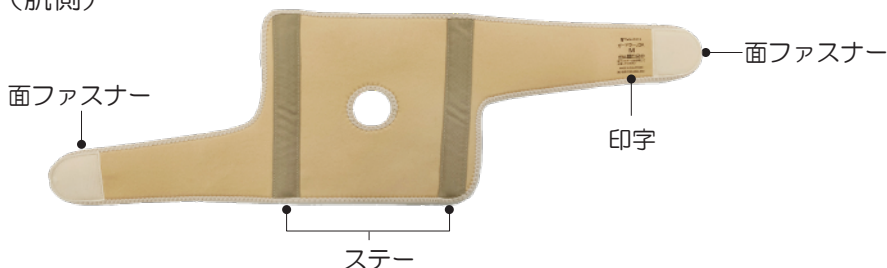

面ファスナー

印字

ステータ

素材

本体：ナイロン
ポリエステル
ポリウレタン
ステータ：ポリエステル

こんなかたに

●長時間の歩行が辛い


●階段の上り下りが辛い

●立ち座りするのが辛い



装着方法

・左右兼用

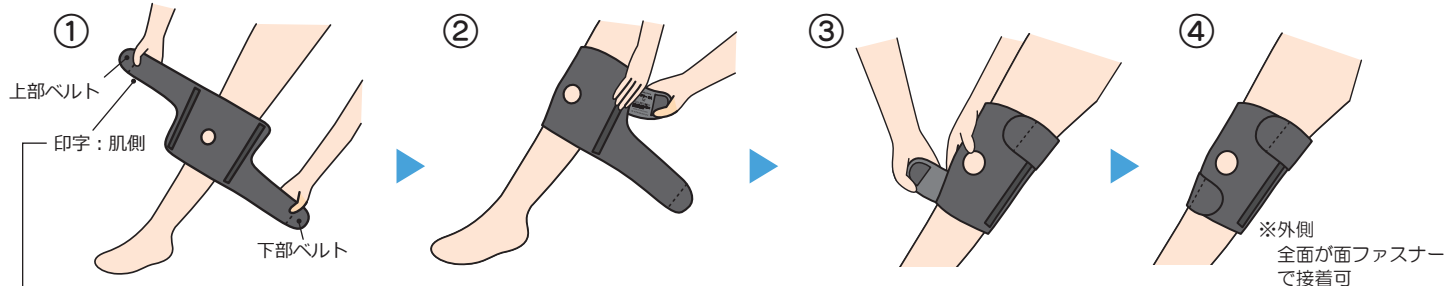

①肌側、上下を確認

膝を伸ばした状態で商品の丸穴を膝の中心に合わせます。

②上部ベルトを接着

丸穴の位置がズレないように押さえながら、上部ベルトを脚裏を通して適度な力で前にひっぱり、面ファスナーで固定します。

③下部ベルトを接着

丸穴の位置がズレないように押さえながら、下部ベルトを脚裏を通して適度な力で前にひっぱり、面ファスナーで固定します。

④装着状態を確認

丸穴がしっかり膝の中心に位置するように、調整してください。

※外側
全面が面ファスナーで接着可




ブラック

ベージュ



規格

1枚入

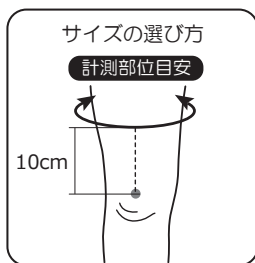

サイズ	膝上廻り	カラー：ベージュ		カラー：ブラック		販売単位	ケース単位
		商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE		
S	26cm ~ 34cm	037332	4958995373325	037342	4958995373424	1枚	5枚
M	34cm ~ 42cm	037333	4958995373332	037343	4958995373431	1枚	5枚
L	42cm ~ 50cm	037334	4958995373349	037344	4958995373448	1枚	5枚
LL	50cm ~ 60cm	037335	4958995373356	037345	4958995373455	1枚	5枚

定価 :2,310円 (税込)
2,100円 (税別)



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店