

# 8の字固定バンドつき足底板

主な用途：膝 OA の保存療法に



## ソフラウルファー® OA

足関節固定バンドと足底板の組み合わせで  
FTA(大腿骨脛骨角)の改善を期待

- 足関節を固定することで足底板の効果を高める
  - ・足底板の矯正力を膝関節へ反映
- 靴を履かない時でも装着可能
  - ・室内でも使えて継続的な効果が得られる
- ワンタッチで固定できる足底板
  - ・左右兼用。向きを変えられて便利、すぐに使える。

ネイビー

ベージュ

左右兼用


フィギュアエイトの効果を応用

足底板とバンドは、着け外し可能


### こんなときに

立ち上がり、歩きはじめなどに膝が痛む

X脚やO脚で変形が目立ち、膝がピンと伸びない

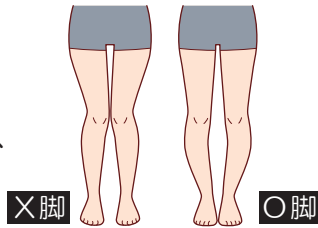


### 本体

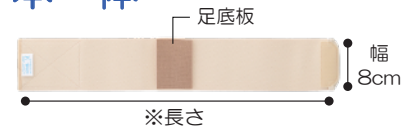


※長さ：S / 45cm  
M / 50cm  
MX / 55cm  
L / 60cm

### 装着方法

例：右足・O脚

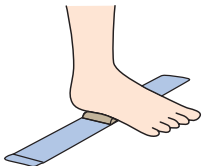

- ①足底板の向きを合わせます。
- ・O脚の場合は外側を高く
  - ・X脚の場合は内側を高く
- 足の裏中央から後方にかけ位置決めをします。

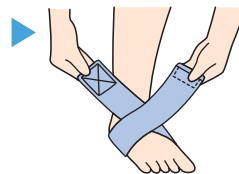

- ②ベルトを適度な強さでひっぱりながら、【8の字】状に足関節を巻き込み、面ファスナー部で接着します。



- ③足底板が足の外側・側面に添うように調整してください。

### 規格

		カラー：ベージュ		カラー：ネイビー			
規格	参考足サイズ	商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	販売単位	ケース単位
S	22.0cm ~ 24.0cm	037772	4958995377729	037962	4958995379624	1枚	5枚
M	23.0cm ~ 25.0cm	037773	4958995377736	037963	4958995379631	1枚	5枚
MX	24.0cm ~ 26.0cm	037777	4958995377774	037967	4958995379679	1枚	5枚
L	25.0cm ~ 27.0cm	037774	4958995377743	037964	4958995379648	1枚	5枚
定価：2,475円(税込) 2,250円(税別)							
定価：1,045円(税込) 950円(税別)							
替えスポンジ 最大部位での高さ12mm (ベージュ/ネイビー共用)		037770	4958995377705	1個			1枚入

### 規格

バンド：ポリエステル  
ナイロン  
レーヨン  
ポリウレタン  
足底板：マイクロセル  
スポンジ



<https://www.taketora-web.com/>

#### 【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤野メディア・ビジネスセンター8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店