

# ライブ®

通気性・吸湿性の高い  
メッシュでムシにくい

- 型くずれしにくい素材で  
しっかり固定
- 幅広な補助ベルトが固定力アップ
- 2本のステーがしっかりサポート



サイズ別に立体裁断、確実な装着




体形に合わせて曲がる金属ステーで  
腰椎への支持効果UP

## 素 材

綿・ナイロン・ゴム・ポリウレタン・アルミニウム（ステー）


## 装着方法

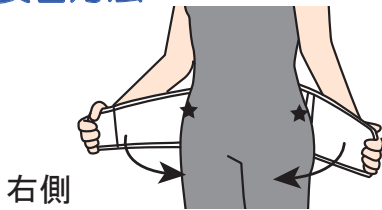

① 本体の両端を持ち、腸骨（★）を覆うように体の正面で留めます。



② 補助ベルトを引っ張り、下腹部を引き上げるように補助ベルトを留めます。

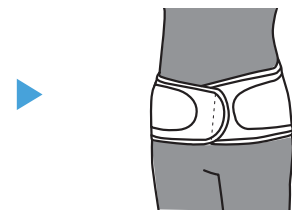

③ 装着完了。ゆるみやズレがないか確かめてください。

## 規 格

オープン価格

商品番号	規格（腰廻り）	販売単位	JAN CODE	ケース単位
034022	S 65cm ~ 75cm	1 枚	4958995340228	5 枚
034023	M 75cm ~ 90cm	1 枚	4958995340235	5 枚
034024	L 90cm ~ 105cm	1 枚	4958995340242	5 枚
034025	LL 105cm ~ 120cm	1 枚	4958995340259	5 枚



1 枚入

サイズの選び方

計測部位目安



★ 腸骨(ちょうこつ)  
骨盤の出っ張った骨の部分

# 腰部固定帯ラインナップ

腰廻り (共通)

S 65cm ~ 75cm

M 75cm ~ 90cm

L 90cm ~ 105cm

LL 105cm ~ 120cm

※ライーフットのみ  
XL 120cm ~ 135cm  
3L 135cm ~ 150cm



## 2段 ベルト

## ライーブ® フィット

3次元形状の特殊樹脂ステー 2本



約23cm

(非伸縮部)  
通気性、吸湿性を  
重視したメッシュ  
素材

- 特長 上下のベルトで  
適確にフィット
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



## スタン ダード

## ライーブ®

フィット性に優れた金属ステー 2本



約12cm

約20cm

(非伸縮部)  
通気性、吸湿性を  
重視したメッシュ  
素材

- 特長 吸湿性が優れている
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



## 幅 広

## ヤイック®

フィット性に優れた金属ステー 2本



約14cm

約23cm

通気性、吸湿性を  
重視した3層特殊  
構造の素材

- 特長 強力弾性素材で  
確実な腹圧上昇
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤メディア・ビジネスセンター8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店