

TFCC 固定バンド



ソフラウルフアー® TFCC



商品詳細
はこちら▶

2本のステーで、効果的な
尺屈・背屈の可動制限が可能

- 上部ベルトと下部ベルトに分かれているため、症状に合わせて適度な場所で固定可能
- 安定した伸縮生地。ソフトな素材で手首以外に負担をかけずADLを制限しない
- 面ファスナーで簡単着脱。左右兼用



こんなときに



ステー
ピンク




ベージュ

手首を繰り返し回して痛む時、
転倒して手をついた時


テニス、ゴルフ、野球、卓球
バドミントン、器械体操など、
手首のねじりが多いスポーツ

本体

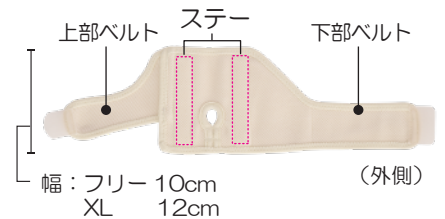

装着方法

例: 右手

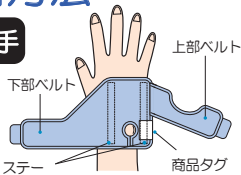


1. 肌側、上下を確認
商品の丸穴を尺骨莖状突起(手首
小指側の突起している骨部分)に
合わせます。



2. 下部ベルトを接着
丸穴の位置がズレないように押さえ
ながら、下部ベルトを手のひら側を
通して適度な力で手の甲側にひっぱり、
面ファスナーで固定します。



3. 上部ベルトを接着
丸穴の位置がズレないように押さえ
ながら、上部ベルトを手のひら側を
通して適度な力で手の甲側にひっぱり、
面ファスナーで固定します。

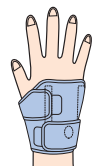

4. 装着状態を確認
丸穴がしっかりと突起部分に位置
するように、調整してください。

規格

定価: 2,475 円 (税込) 2,250 円 (税別)

サイズの選び方
計測部位目安



商品番号	規格	手首回り	販売単位	JAN CODE	ケース単位
037820	ベージュ フリー	12cm ~ 20cm	1 枚	4958995378207	5 枚
037826	ベージュ XL	16cm ~ 24cm	1 枚	4958995378269	5 枚
037850	ネイビー フリー	12cm ~ 20cm	1 枚	4958995378504	5 枚
037856	ネイビー XL	16cm ~ 24cm	1 枚	4958995378566	5 枚
037821	ピンク フリー	12cm ~ 20cm	1 枚	4958995378214	5 枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位です



1 枚入

素材

ポリエステル
ナイロン
レーヨン
ポリウレタン
ポリエチレン(ステー)



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 2-23 藤野メディアビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店