

N-95 対応サージカルマスク

サージマスク N-95 (折りたたみ式)



軽量で着け心地がよい NIOSH 認可マスク

- フェイスラインに密着するので結核などの空気感染予防に
- NaCl (粒子径 $0.075 \pm 0.02 \mu\text{m}$) の粒子試験で、捕集効率 95%以上
- 肌にやさしいラテックスフリー
- 10枚入：小分け時に便利で衛生的な個包装

日本製
MADE IN JAPAN



▲商品詳細
はこちら

N-95 マスクとは

NIOSH (米国労働安全衛生研究所) の規格に合格したマスクです。結核や SARS の感染防止に効果が認められ、感染者が発する飛沫 (せき、くしゃみ) や菌などの微粒子から、呼吸器感染のリスクを軽減する目的として使用されています。



NEW



10枚入



50枚入

ノーズブリッジで
ピッタリフィット



素材

本体：ポリプロピレン・ポリエチレン
ノーズブリッジ：ポリエチレン・鉄芯

装着方法 ※フェイスシールドとの併用も可能です



1 マスクを上下に開き
ノーズブリッジを上にして、
鼻に沿うよう軽く曲げます

2 マスクの下側をあごに
掛け、マスク下側ゴムを
首に掛けます

3 上側ゴムを頭頂部に
持っていきます

4 両手でノーズブリッジを指先
で押さえつけるようにして鼻
の形に合わせます

5 両手でマスクを覆い、呼吸を
して**空気のもれをチェック**し
装着完了です

| 商品番号 | 規格 | | 販売単位 | 定価 | JAN CODE |
|-------------------|--------|----------------------------|---------|----|--------------------|
| NEW 076078 | ホワイト | 7.5cm×24.0cm (折りたたんだ状態の寸法) | 1枚入 ×10 | 1箱 | オープン 4958995760781 |
| 076073 | M ホワイト | 7.5cm×24.0cm (折りたたんだ状態の寸法) | 50枚入 | 1箱 | オープン 4958995760736 |



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店