

# 外反母趾サポート



# クロスガイダー<sup>®</sup>

## 特長


- 外反母趾の矯正用サポーターです。
- ソフトな固定で、面ファスナーによる簡単着脱です。




※右用の着用例




## 装着方法 (例) 右用

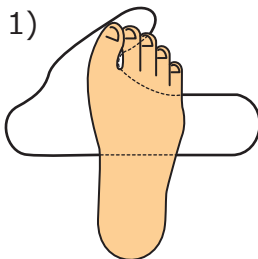


1) 上図のように足を置きます。

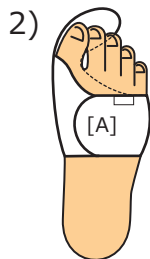

2) 甲部分のベルト [A] を面ファスナーで留めます。

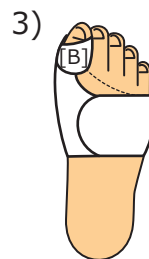

3) 母趾部分のベルト [B] を、母趾を内反させるように面ファスナーで留めます。

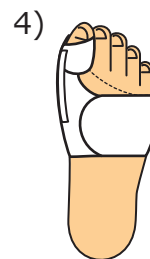

4) 補助テープにより、矯正力を調整してください。

## 規格

●定価 1,760 円(税込)  
1,600 円(税別)

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
037610	右用	1 枚	4958995376104
037611	左用	1 枚	4958995376111



<https://www.taketora-web.com/>

### 【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店