

あらかじめレスキュー E バックシートをマットレスとベッドの間に入れます。 災害や火災の際に被救護者を迅速に避難させることができます。

シートには両方の短側面に長いハンドルがついており、背中を伸ばした状態で 避難でき、身体的負担を軽減できます。

製品情報

- ・上下対称なデザインでベッドの足側からでも時には頭側からでも避難させられます
- ・安全に避難するための被救護者固定用ストラップつき
- 日常のベッドメイキングを妨げません
- 濡れた場所でも乾いた面のように 滑ります
- 頑丈なハンドル
- マットレスを動かすための、 側面ハンドルつき
- マットレスを変色させません







洗濯

乾燥機

商□釆□ 0/1100

- ※ 左記 QR コード より使用方法を 動画でご覧にな れます。
- ※ インターネット 環境によりご覧 になれない場合 があります。

田ケ	041190
ズ	90 cm×200 cm
単位	1枚
価	52,800円(税込 48,000円(税別)
コード	4958995411904
単位	10枚
者体重	140kg
本体:ポリエステル ハンドル:ポリエステル 固定用ゴム:ポリエステル・ラテックス 固定用バックル:ポリアセタール樹脂	
	単 単 本ハ固 ・ズ 位 体 ・ 本ハ固 ・ド用



https://www.taketora-web.com/

【メディカル事業部】

東日本西日本


〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 熊メティア・ヒシネスセンター8F TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101 取扱店

レスキュー Eバックシート 使用方法



1. ストラップを被救護者にしっかり留めます。

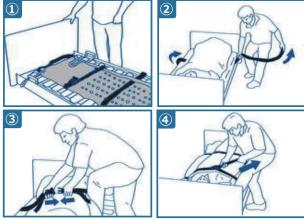

- 事前に「レスキュー E バックシート」をベッド本体とマットレスの間に敷きます。 (ストラップは外し左右にまとめておきます)
- ②③ 避難時にはストラップを取り出し、被救護者を乗せたまま寝具ごと巻きつけます。
- 4 被救護者が脱落しないようしっかり取りつけます。
- **2.** 被救護者を床に移し、被救護者を引張ります。 安全のため、被救護者を引張る際は、救護者は背中をまっ すぐにしてください。

シートの両端についた長いハンドルによって、救護者は無理のない姿勢でつかむことができ、被救護者を避難させている際に背中を痛めるリスクを軽減します。



ベッドの種類によっては、マットレスを90度回転させ 被救護者を床に移します。



3. 避難中は床の上でも階段を下りる際も終始被救護者の足側を引張ってください。被救護者がケガをするリスクを最小限にするためです。





側面のハンドルはマットレス を持ち上げたり水平に動かす 際に使用します。

