

キャスト

ソフラフィックス® キャストII



一般医療機器

ギブス包帯 (JMDN コード 33056000)
届出版売名: ソフラフィックスキャストII
届出番号: 13B2X10294000012
製造販売元: 華琳 株式会社

ベタつきが少なく スムーズな巻き心地


● 強度の高いグラスファイバー製
高い固定力で効果的に患部を保護。

● 優れたフィット性
縦、横、斜め方向に伸縮性があり、あらゆる形に
追従する、優れたフィット性。

● 強力な接着力
テープ同士の接着力が強く、層間剥離・端剥れが
少なくしっかり巻ける。



▲商品詳細
はこちら

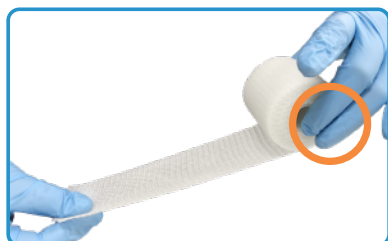

芯材を持って巻く場合も安心
なめらかなエッジの芯材



滑りにくく開封しやすい
丸穴付き



1巻入 (3号)

使用方法

・1巻の場合



1 適当な長さにカットした
チューブ包帯を患部にか
ぶせます。



2 チューブ包帯の上到下巻
わた包帯を1/2くらい重
なるように少し強めに巻
きます。



3 ゴム手袋を着用し、ソフ
ラフィックスキャストIIを
水に浸してから巻きます。



4 テープ幅の1/2~2/3
くらい重ねながら、転が
すように巻いていきます。




5 巻き終わりましたらゴム手
袋を水につけて、よくモー
ルディングします。テープ
の端末は、10秒くらいしっ
かりおさえてください。


・2巻以上使用する場合



1 チューブ包帯と下巻わた
包帯で、下巻きを行いま
す。

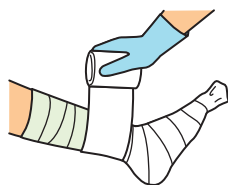

2 1巻目のソフラフィッ
クスキャストIIを水に浸さ
ず巻きます。

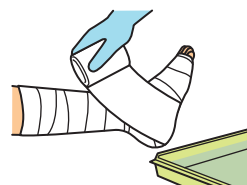


3 2巻目からはソフラ
フィックスキャストIIを
水に浸して巻きます。あ
とは、1巻使用方法と同
じように処理します。



4 巻くテープの層数は、荷
重のかからない部位で2
~3層、荷重のかかる部
位で4~5層が目安です。

除去方法

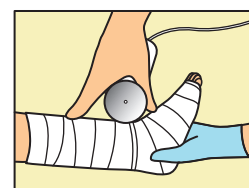

本品の除去は、ギブス
カッターで行ってくだ
さい。

素材

グラスファイバー

規格

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE	ケース単位
030132	2号 5.0 cm × 3.6 m 10巻入	1箱	6,545円(税込) 5,950円(税別)	4958995301328	10箱
030133	3号 7.5 cm × 3.6 m 10巻入	1箱	7,865円(税込) 7,150円(税別)	4958995301335	10箱
030134	4号 10.0 cm × 3.6 m 10巻入	1箱	10,450円(税込) 9,500円(税別)	4958995301342	8箱
030135	5号 12.5 cm × 3.6 m 10巻入	1箱	11,880円(税込) 10,800円(税別)	4958995301359	6箱



キャスト使用時関連アイテム

キャスト使用手順

①



メリヤスチューブ包帯を患部にかぶせます



②



チューブ包帯の上にわた包帯を巻きます



③



手袋を着用し、キャストを水に浸してから巻き、よくモールドングします

メリヤスチューブ包帯 (キャスト材に最適なギプス用下巻包帯)

ソフラバンダ®

●肌ざわりの良い綿100%



●規格：2号・3号・4号・5号・8号

ソフラバンダ®PE

●撥水性に富んだポリエステル100%



●規格：2号・3号・4号・5号

わた包帯

ニューギプステクター®

●フィット性があり、ハンドカットしやすいギプス用の下巻包帯
●ギプスカット時に目安になるブルーカラー



●規格：2裂・3裂



手袋

一般医療機器

タケトラ®ニトリル手袋


●指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップを発揮
●テープが付きにくいので、作業性が向上



●規格：SS・S・M・L
●カラー：ブルー・ホワイト

一般医療機器

タケトラ®ニトリル手袋ロング

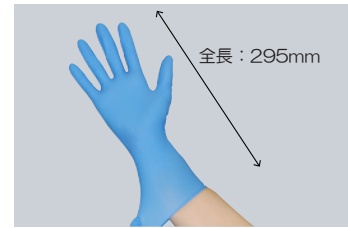

●規格：SS・S・M・L
●カラー：ブルー



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 藤メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店