

■使用上の注意

ガウン	<ul style="list-style-type: none"> ・ デisposable用品です。再使用しないでください。 ・ 使用後は衛生的に処理してください。 ・ 装着方法をよく読み、正しくご使用ください。
マスク	<ul style="list-style-type: none"> ・ デisposable用品です。再使用しないでください。 ・ 使用後は衛生的に処理してください。 ・ 装着方法をよく読み、正しくご使用ください。 ・ 有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的では使用しないでください。 ・ 使用中にかゆみ、かぶれ、発疹などの異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。 ・ 肌に合わない時または装着部位に傷やはれもの等がある時はただちに使用を中止してください。 ・ 使用中に臭いで気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。 ・ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 ・ 火のそばに置くと軟化し、変形・引火のおそれがありますので絶対に置かないでください。 <p>※ マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。</p>
キャップ	<ul style="list-style-type: none"> ・ デisposable用品です。再使用しないでください。 ・ 使用後は衛生的に処理してください。 ・ 装着方法をよく読み、正しくご使用ください。
シューカバー	<ul style="list-style-type: none"> ・ デisposable用品です。再使用しないでください。 ・ 使用後は衛生的に処理してください。 ・ 装着方法をよく読み、正しくご使用ください。 ・ 商品の劣化が発生しますので、殺菌灯付きロッカー・蛍光灯の近く・直射日光など、紫外線が強くあたる場所には保管しないでください。
グローブ	<ul style="list-style-type: none"> ・ デisposable用品です。再使用しないでください。 ・ 使用後は衛生的に処理してください。 ・ 装着方法をよく読み、正しくご使用ください。 ・ 体質的に手に湿疹、カブレ等の出来やすい方は使用しないでください。 ・ 使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中断し医師に相談してください。 ・ 本品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないでください。 ・ 手術用、検診用としてのご使用は避けてください。 ・ 本品は薄いため、熱・熱湯等の熱源に触れると火傷の恐れがありますので注意してください。 ・ 刃物、金たわし等の鋭利なもので傷をつけると、破れやすくなりますので注意してください。 ・ 油・溶剤が付着しますと破れやすくなりますので注意してください。

■「品質合格証」封入について

本製品に、「品質合格証」が封入されております。中国国内で新型コロナウイルス騒動に便乗した粗悪品を製造する工場が増加しており、中国政府はマスクやガウン等の医療消耗品に厳しい輸出制限を実施しております。この規制を受け、日本国内へ商品の円滑な輸入を行うために、品質合格証が商品に封入される事になりました。

・(非医用)表記について

中国における(非医用)とは手術処置以外で使用する材料のことを示します。従いまして(非医用)という表記においても、今まで通り日本国内の医療現場で安心してご使用いただける品質です。

発売元



株式会社 竹虎®

https://www.taketora-web.com/ E-mail info@taketora-web.com

メディカル事業部 東日本営業部 TEL.045(680)0308(代)
西日本営業部 TEL.06(6386)7217(代)

ウェルネス事業部 営業部 TEL.045(680)0340

編集協力

公益財団法人
日本訪問看護財団

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2
日本看護協会ビル 5F

TEL 03-5778-7001 FAX 03-5778-7009

感染防護基本セット(スタンダード) 取扱説明書



*本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前に必ず、この『取扱説明書』をお読みください。

*内容をご理解頂き、記載事項をお守りください。

*本セットはスタンダードプリコーション(標準予防策)に基づいた个人防护具(PPE)が一通り揃っておりますが、対象の方の状態に応じて使用する製品を組み替えてご使用ください。

使い方はこちら



■セット内容

- 1包内容
 - ・ガウン 1枚
 - ・シールド付きマスク 1枚
 - ・キャップ 1枚
 - ・シューカバー 2枚
 - ・グローブ(プラスチック手袋 M サイズ) 2枚
 - ・商品パッケージ兼廃棄袋

■本製品の特長


- 訪問看護師等の医療従事者や介護者を感染性物質(血液や飛沫など)から保護する个人防护具(※PPE)です。
- コンパクトで持ち運びに便利、ひと袋で医療機関等で求められる安全性の高い水準で感染対策が可能です。

【こんな時にご使用ください】

- ・ 訪問診療や往診時に
- ・ 外来時に
- ・ 訪問看護や訪問介護の時に
- ・ ご家族の感染時
- ・ 災害時や感染蔓延時の備蓄に

- 防護具が入っているパッケージは大き目のA4サイズ袋なので防護具を外した後、空になった袋に入れて安全に廃棄することができます。

※PPE(Personal Protective Equipment)とは・・・感染対策が必要な状況において使用する使い捨ての个人防护具のことです。

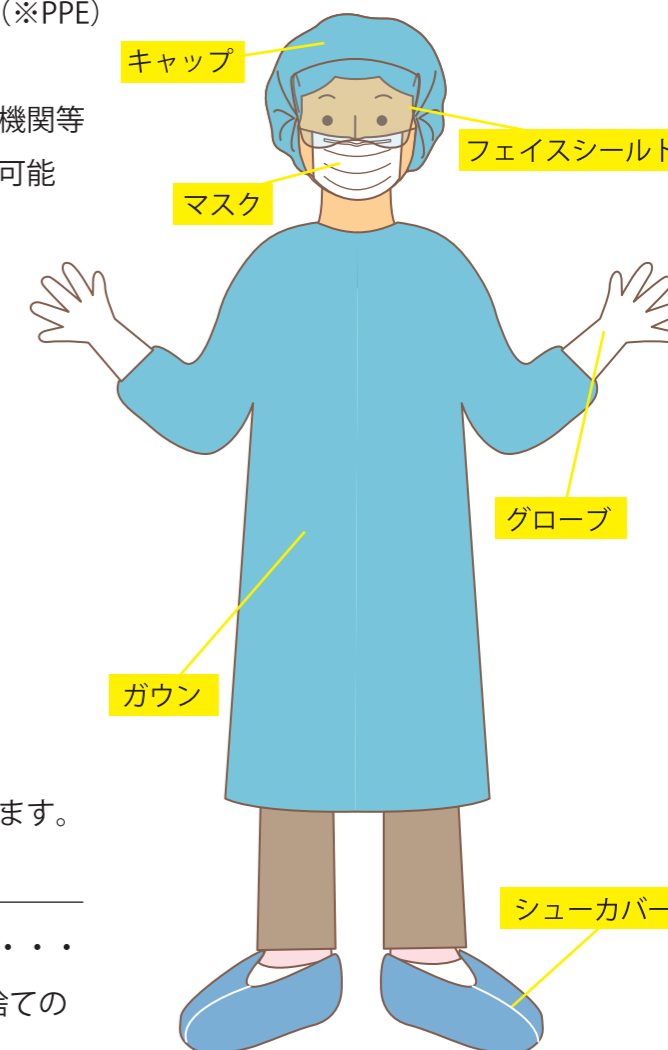


感染防護基本セット着け方

入室前に着用します
ガウン→マスク→キャップ→シューカバー→グローブ


■はじめに

袋から防護具を取り出しアルコール消毒液やアルコール含浸カット綿等で手指の消毒をする。

※空になった袋は、防護具を外した時に廃棄袋として利用できます。

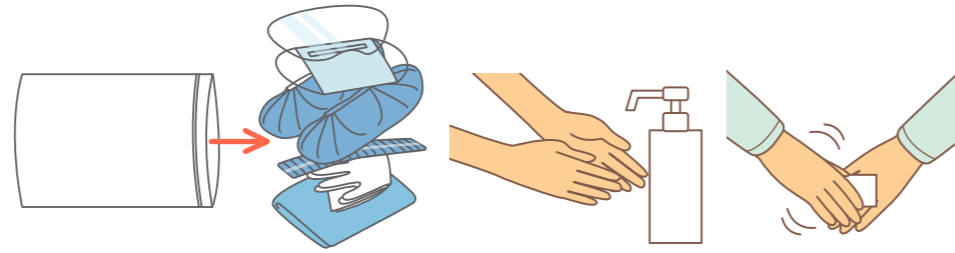


1 ガウン

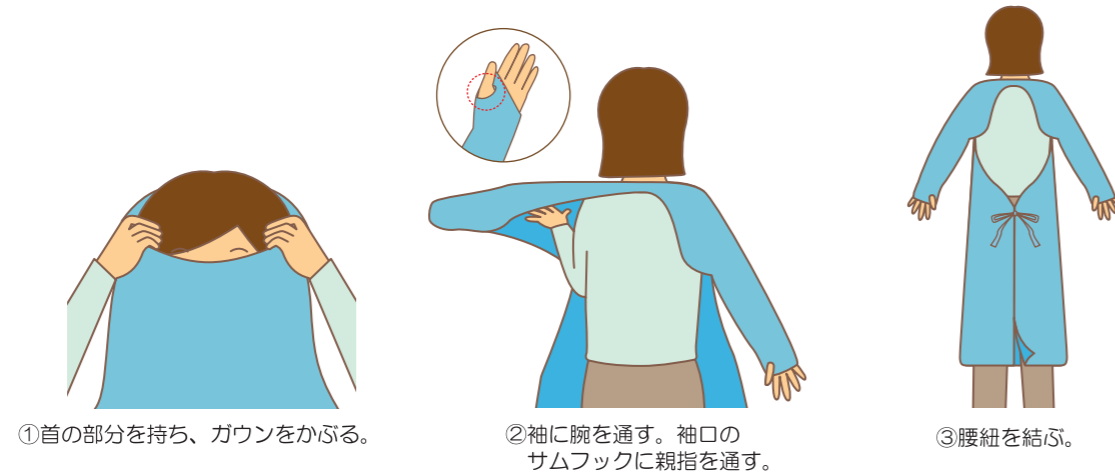

2 マスク



3 キャップ

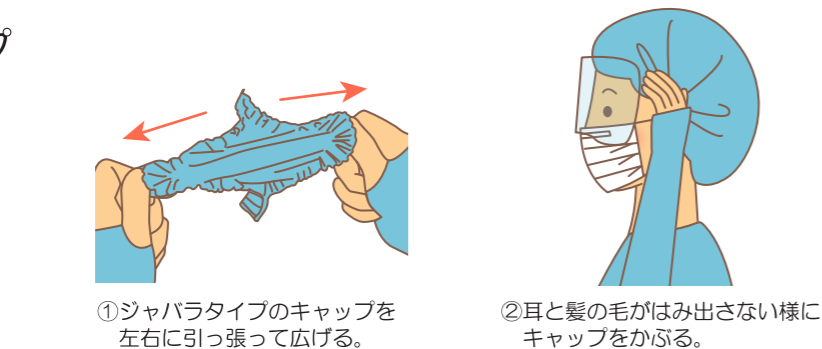

4 シューカバー



5 グローブ




感染防護基本セット外し方

退室前に外します
グローブ→ガウン→消毒→キャップ→マスク→シューカバー


⚠ 外す際は表面（汚染面）に触れないでください。

(防護具が入っていた袋を利用します)

1 グローブ

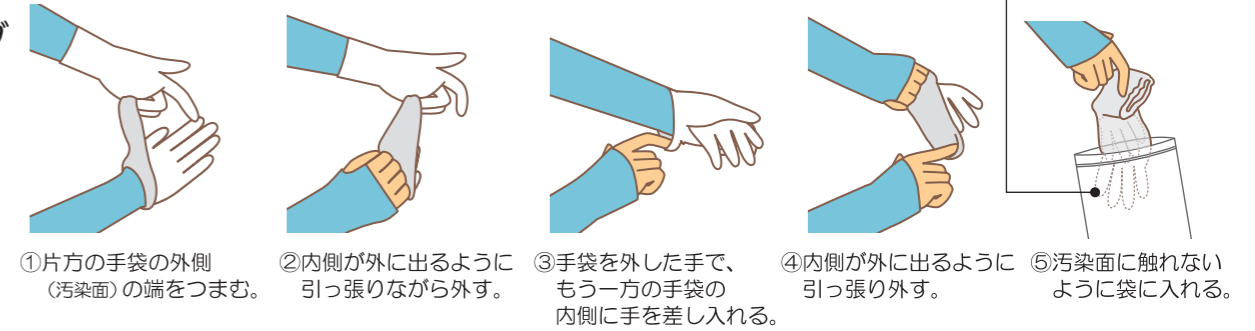


2 ガウン

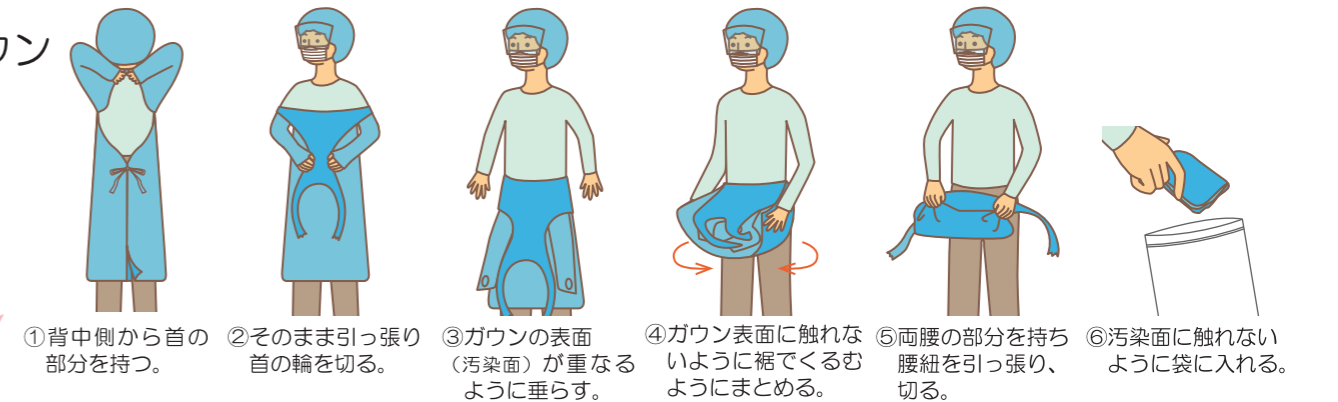

3 消毒



4 キャップ

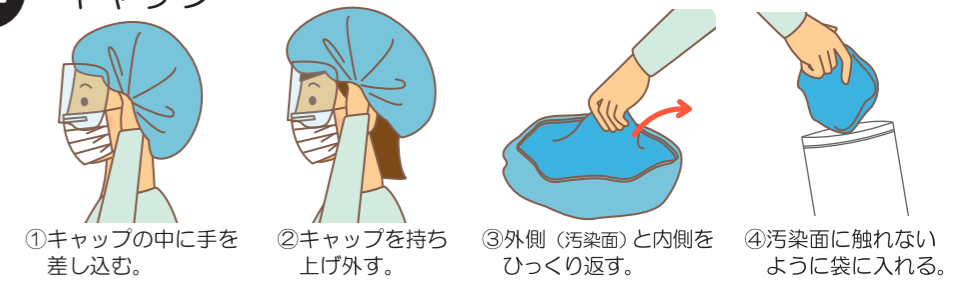

5 マスク



6 シューカバー



■さいごに

袋を閉じ、廃棄する。
アルコール消毒液やアルコール含浸カット綿等で手指の消毒をする。

