

CM 関節固定バンド

主な用途：CM 関節症、腱鞘炎、関節リウマチ
第一 MP 関節の側方靱帯損傷など



商品詳細
はこちら▶

ソフラウルファー®CM

日常生活動作（ADL）を制限しない
ソフトな素材

- 母指（親指）の対立位を効果的に保持
- 手首をしっかり固定
- 面ファスナーで簡単調節。左右兼用



ネイビー
■ 選べる3色

CM 関節
（親指の三つ目の関節）
MP 関節
（親指の二つ目の関節）

こんなときに



ピンク




ベージュ

- タオルを絞る、強くつまむ、握ったりする時に痛む
- 赤ちゃんを抱っこする時
- ドゥケルバン症候群や、手根管症候群などの症例にも応用

■ スマートフォン、キーボード使用時

本体

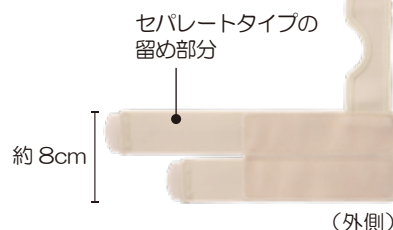

セパレートタイプの
留め部分

約 8cm

（外側）

装着方法

★：母指 CM 関節位置

例：右手

- ①ループベルト
②上部ベルト
③下部ベルト
④接着部
1. ①を④に仮接着し、母指を通します。
2. ★が①の本体つけ根部位に位置するように、②を④に仮接着します。
3. ③を適度な強さでひっぱり、④に接着します。
4. 「2.」で仮接着した②を外します。「1.」で仮接着した①を適度な強さでひっぱり、④に接着します。
5. ②を①の先端部に重ねながら、④に接着します。

規格

定価：2,585 円（税込）2,350 円（税別）

サイズの選び方
計測部位目安



商品番号	規格	手首廻り	販売単位	JAN CODE	ケース単位
037920	ベージュ フリー	12cm ~ 20cm	1 枚	4958995379204	6 枚
037926	ベージュ XL	16cm ~ 24cm	1 枚	4958995379266	6 枚
037930	ネイビー フリー	12cm ~ 20cm	1 枚	4958995379303	6 枚
037936	ネイビー XL	16cm ~ 24cm	1 枚	4958995379365	6 枚
037921	ピンク フリー	12cm ~ 20cm	1 枚	4958995379211	6 枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位です

1 枚入



素材

ポリエステル
ナイロン
レーヨン
ポリウレタン



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 2-23 藤田メディアビジネスセンター 8F
東日本 TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
西日本 TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店