

# ライーブ® フィット

## 上下のベルトで適確に腰にフィット

● 高いフィット性

サイズ別の弓状カットライン（立体裁断）で  
確実な装着感

● ズレ防止の滑り止めテープ付



滑り止めテープ  
（肌側）


● 2本のステーがしっかりサポート



特殊樹脂を用いた  
3次元形状




通気性・吸湿性（肌側）のあるメッシュ

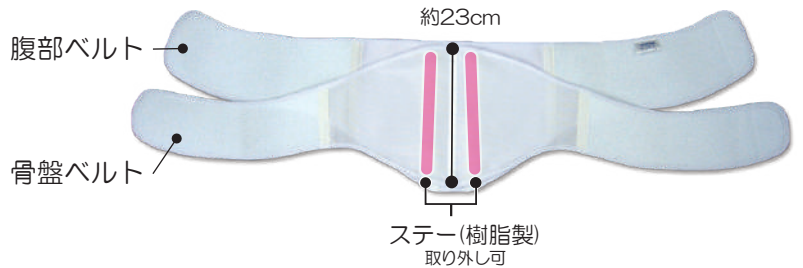


### 素 材

綿・ナイロン・ゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネイト（ステー）

### 装着方法

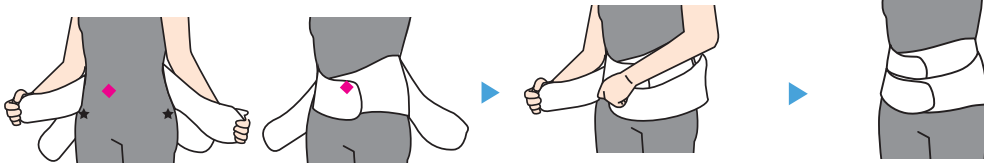

お腹まわりの大きめな方

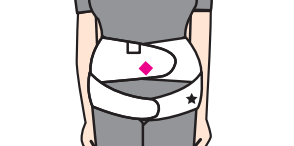

腹部ベルトをへそよりやや  
上部に装着し、骨盤ベルト  
の下縁が腸骨にかかるよう  
に引っ張りながら体の正面  
で合わせます。

①腹部ベルトを腰部の中心に位置し、  
十分引っ張りながら、へそに対し  
中心になるよう体の正面で合わせます。

②骨盤ベルトを引っ張り  
ながらベルトの下縁が  
腸骨にかかるように  
合わせます。

③装着完了。  
ゆるみやズレがないか  
確かめてください。

サイズの選び方

計測部位目安

★腸骨（ちようこつ）  
骨盤の出っ張った骨の部分

### 規 格

商品番号	規格（腰廻り）	販売単位	JAN CODE	ケース単位
034202	S 65cm ~ 75cm	1 枚	4958995342024	5 枚
034203	M 75cm ~ 90cm	1 枚	4958995342031	5 枚
034204	L 90cm ~ 105cm	1 枚	4958995342048	5 枚
034205	LL 105cm ~ 120cm	1 枚	4958995342055	5 枚
034206	XL 120cm ~ 135cm	1 枚	4958995342062	5 枚
034207	3L 135cm ~ 150cm	1 枚	4958995342079	5 枚

オープン価格



# 腰部固定帯ラインナップ

腰廻り (共通)

S 65cm ~ 75cm

M 75cm ~ 90cm

L 90cm ~ 105cm

LL 105cm ~ 120cm

※ライーブフィットのみ  
XL 120cm ~ 135cm  
3L 135cm ~ 150cm



## 2段 ベルト

## ライーブ® フィット

3次元形状の特殊樹脂ステー 2本



(非伸縮部)  
通気性、吸湿性を  
重視したメッシュ  
素材



約23cm

- 特長 上下のベルトで  
適確にフィット
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



## スタン ガード

## ライーブ®

フィット性に優れた金属ステー 2本



(非伸縮部)  
通気性、吸湿性を  
重視したメッシュ  
素材

約12cm



約20cm

- 特長 吸湿性が優れている
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



## 幅 広

## ヤイック®

フィット性に優れた金属ステー 2本



通気性、吸湿性を  
重視した3層特殊  
構造の素材

約14cm



約23cm

- 特長 強力弾性素材で  
確実な腹圧上昇
- 色 ホワイト
- 価格 オープン



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤野メディア・ビジネスセンター8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店