

足関節固定バンド

ソフラウルファー® フリー



▲商品の詳細はこちら

足首の安定した圧迫固定に

- フィギュアエイトの効果을 応用
- 適度な伸縮性で足首をしっかりと固定
重心がブレにくい
- 自由な位置で接着でき調節しやすい、
左右兼用

外側全面が面ファスナーで留められる、便利なフリーサイズ
固定力を自由に調整可能



ベージュ

ブラック


フィギュアエイト：足首の安定を高める巻き方



土踏まずが上がり
アーチの崩れを防ぐ

【アーチの役割】

- ① 体重を支える
- ② スムーズな歩行をサポート
- ③ 歩行時の衝撃を吸収

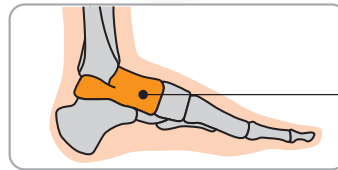


距骨の動揺を制限し
足首をしっかりと固定


距骨（きょこつ）
全体重がかかる重要な骨
体のバランスを保ち、
足首を滑らかに動かす役割

装着方法


例) 右足

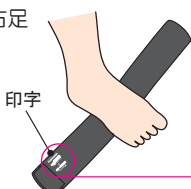

① 印字のある面を上にして、足の小指側になるように中央に足を置きます。

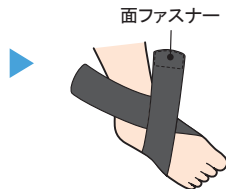

② バンドを伸ばしながら、足関節を“8の字状”に巻き込みます。内側（土踏まず側）のバンドを下にして足の甲の真ん中で交差するようにしてください。

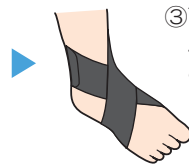

③ 面ファスナーが、バンドからはみ出ないように接着してください。

※バンド外側：全面が面ファスナー接着できます。

本体

(肌側)



ブラック



ベージュ



(外側：全面が面ファスナー接着可)



規格

定価：1,430 円 (税込) 1,300 円 (税別)

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
037700	ベージュ 8cm×55cm	1 枚	4958995377002	6 枚
037701	ブラック 8cm×55cm	1 枚	4958995377019	6 枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位です

素材

ナイロン
ポリエステル
ポリウレタン

カラーが分かる透明窓
1 枚入



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 2-23 横浜メディアビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店