

肩・腕固定用 腕吊り



ソフラスリング®

腕をがっちりガード

従来からの三角巾と同じ
綿100%素材で腕を
がっちりガードします。

独自の立体裁断により
肘の部分が無駄なく
収まります。



装着方法



① 丸い肘部に、内側から
肘を押し当てるように
合わせます。




② ひも部の両端は首を
挟んで左右から後ろ
にまわします。



③ 手首から肘までを水平に
保ち、首の後ろでひも部
の両端を結びます。

規 格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
037653	M 身長 165cm 以下 上腕 30cm 未満・前腕 25cm 未満	1 枚	4958995376531
037654	L 身長 160cm 以上 上腕 30cm 以上・前腕 25cm 以上	1 枚	4958995376548

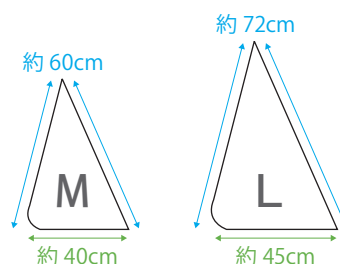

●定価…オープン価格

※ケース単位…20 枚入



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店