

8の字固定バンド付アーチパッド


ソフラウルファー® アーチシリーズ



アーチの崩れによる足のトラブルに

- 面ファスナーで簡単着脱
- 二峰性アーチパッドにより、歩行を補助
- 靴を履かない場面の使用でも効果的

足関節固定により
歩行が安定

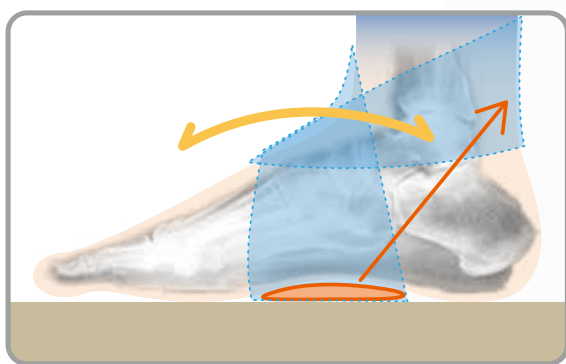

ベルトでパッドを引き上げることで
アーチがより補高されます



アーチパッド
(ベルト内側)

二峰性アーチパッドと足関節固定バンドの組み合わせにより
効果的なアーチ形成をサポート

● アーチの高さによって選べる2種類

ソフラウルファー® アーチ ローパッド

・主に扁平足の方に

商品ページ▶



高

低

ソフラウルファー® アーチ ハイパッド

・主に足底腱膜炎の方に

商品ページ▶



高

低

高 い山で内側縦アーチを補正

低 い山が外側への動揺を軽減し歩行を補助

素 材

本 体：ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン
パッド：ポリウレタンスポンジ

本体仕様


ローパッド



土踏まず側▲

例：ベージュ

ハイパッド

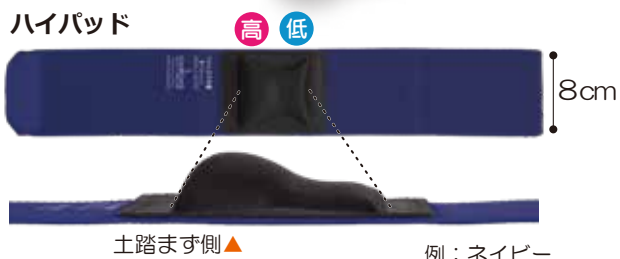

土踏まず側▲

例：ネイビー

装着方法



装着ポイント

※土踏まずが高い山に
当たるように装着
します。

①アーチパッドの
高い山の方が
足の内側になるように、
足を置きます。

②バンドを伸ばしながら
足関節を“8の字状”に
巻き込みます。

③面ファスナー A 面が
面ファスナー B 面から
はみ出ないように
接着してください。

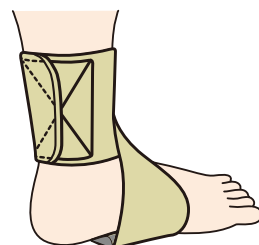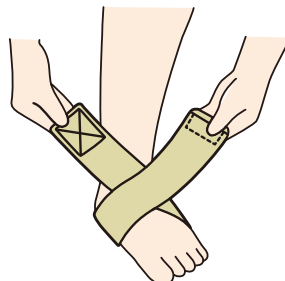

規 格

●ソフラウルファー®アーチ ローパッド

定価：2,475 円（税込）2,250 円（税別）

			カラー：ベージュ		カラー：ネイビー		販売単位
規格	足サイズ（参考値）		商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	
S 8cm×45cm	22.0～24.0cm		038122	4958995381221	038132	4958995381320	1 枚
M 8cm×50cm	23.0～25.0cm		038123	4958995381238	038133	4958995381337	1 枚
L 8cm×55cm	24.0～26.0cm		038124	4958995381245	038134	4958995381344	1 枚
LL 8cm×60cm	25.0～27.0cm		038125	4958995381252	038135	4958995381351	1 枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位（5 枚入）です



ロー
パッド

1 枚入

●ソフラウルファー®アーチ ハイパッド

定価：2,475 円（税込）2,250 円（税別）

			カラー：ベージュ		カラー：ネイビー		販売単位
規格	足サイズ（参考値）		商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	
S 8cm×45cm	22.0～24.0cm		038142	4958995381429	038152	4958995381528	1 枚
M 8cm×50cm	23.0～25.0cm		038143	4958995381436	038153	4958995381535	1 枚
L 8cm×55cm	24.0～26.0cm		038144	4958995381443	038154	4958995381542	1 枚
LL 8cm×60cm	25.0～27.0cm		038145	4958995381450	038155	4958995381559	1 枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位（5 枚入）です



ハイ
パッド

1 枚入



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 新メディア・ビジネスセンター8F
東日本 TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
西日本 TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店