

# 頸部固定帯

主な用途：頸椎部位の保護・安静保持



## ドルフ® ソフト2号

一般医療機器

成形副木 (JMDN コード 35354000)

届出版売名：ドルフソフト

届出番号：14B3X10016000014

製造販売元：株式会社竹虎

### 軽量でスタンダードな1枚タイプ

- ソフトなウレタンを使用した頸椎固定用シーネ
- 頸部を固定し、損傷部への負担軽減
- 洗濯できるカバー付

2024年4月  
ブラック発売

NEW



汚れが目立ちにくく衣服になじむブラック新登場



面ファスナーでの  
簡単ワンタッチ留め  
(首後ろ)



(肌側)

肌になじむベージュ

カバーはムシにくい生地を使用

二重構造の編組織によって、  
吸収性・拡散性・速乾性などに優れ  
「表面はサラッとした感触、内側で  
吸収・拡散・速乾」の性能を発揮し  
ます。

吸収イメージ



ドルフソフト2号 ナイロン  
(ポリエステル)

### 装着方法

タグを付けてあるほうが外側です



①中央のくぼんでいる部分にあごをあてます。



②首の後ろで面ファスナーを留めます。



③ゆるみやズレがないか確かめてください。

### 素材

表面材：綿  
面ファスナー：ナイロン

芯材：ウレタン  
カバー：ポリエステル

### 規格

規格	高さ/首廻り	カラー：ベージュ		カラー：ブラック		定価：オープン	
		商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	販売単位	ケース単位
S	7.5cm 30cm～35cm	035092	4958995350920	035192	4958995351927	1枚	5枚
M	8 cm 36cm～41cm	035093	4958995350937	035193	4958995351934	1枚	5枚
L	8 cm 42cm～47cm	035094	4958995350944	035194	4958995351941	1枚	5枚



【保険対応】 処置にあたり頸部固定帯を使用した場合 区分J119-2 固定35点の算定に対して、区分J200 固定帯加算(初回のみ) 170点を加算できる。



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター8F

TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F

TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店