

医04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

ディスポドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

・本品は、不織布製のドレープである。使用部位や手術手技に応じて、寸法、形状、開窓部の有無等が異なる。また、粘着テープを有したものもある。

<滅菌方法>

エチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。

【使用方法等】

1. 本品を包装袋外側と接触しないように取り出す。
2. 本品で患者身体の適切な部位を覆う。
3. 手技が完了したら本品を外し廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、廃棄すること。
- 2) 粘着材を使用している製品については、個人差により皮膚刺激性が発生する場合がある。患者の皮膚に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

<その他の注意>

- 1) 高熱を発生する医療機器、火気等に接触させないこと。
- 2) 本品を医療従事者以外が使用する場合は、必ず医療従事者の指導、指示を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

<有効期間>

本品の包装に記載されている有効期限[自己認証による]までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者及び製造業者>

株式会社 ララ

【販売業者(問い合わせ窓口)】

株式会社竹虎

URL <http://taketora-web.com/>

フリーダイヤル 0120 - 094 - 315