

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

タケトラ医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。

【使用上の注意】

使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

*製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

湖北金士達医用産品有限公司(中国)

(KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd.)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 フリーダイヤル 0120-094-315

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

ソフラガゼロン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ製品です。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

- (1) 適宜滅菌して使用する。
- (2) 滅菌は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- (1) 体内に留置しないこと。
- (2) 開封後は早めに使用すること。
- (3) 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ

Tel 0725-55-2788

★A4判の添付文書が必要な場合は別途ご請求ください。