

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

タケトラ滅菌医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、滅菌してある。

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、
液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官
の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に
適用することを目的とする。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

袋が開封、破損又は汚損している場合は、滅菌品として
使用しないこと。

開封後は、直ちに使用すること。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない
清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限〔自己認証(自社データによる)〕を、袋及び
外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

**製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

*住重アテックス株式会社 つくばセンター

*住重アテックス株式会社 関西センター

湖北金士達医用産品有限公司(中国)

(KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 0120-094-315