

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

タケトラX線造影材入りガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

内部にX線造影材を含むことにより、X線にて検知することができる。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として。身体内部又は外科切開部に用いる。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

【使用上の注意】

使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

* 高圧蒸気滅菌を行う場合、130℃以上の高温で滅菌すると、

素材の性質上X線造影材が変質する恐れがあります。

* 高圧蒸気滅菌の滅菌条件は、115～118℃30分で行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

**製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

湖北金士達医用産品有限公司(中国)

(KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd.)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 0120-094-315