

正しいマスクの


付け方
チェック



マスクにも正しい着け方・順序というものがあります。正しい着け方をしていなければマスクの効果は半減してしまいます。


向きの確認

- ①ノーズブリッジが入っている部分が上
- ②プリーツの向きが下になるよう装着
- ③ロゴが入っている部分が下
ロゴは装着した際に外から読めるように

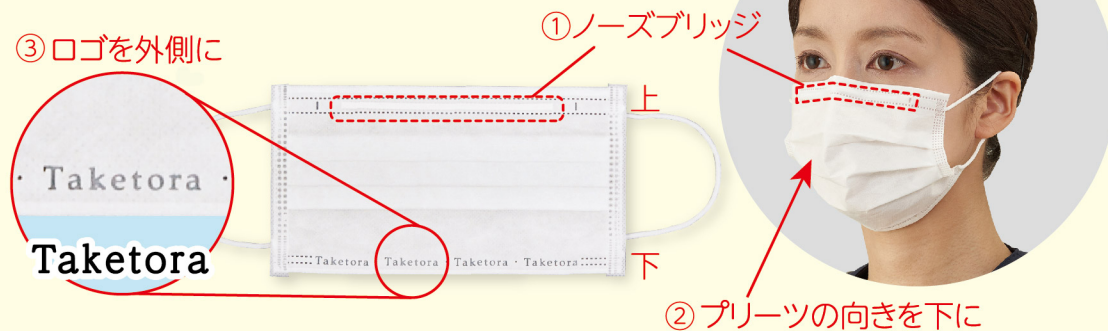

装着方法

- 1 マスクの真ん中(ノーズブリッジ)の部分に折り目を入れてから上下に広げます。

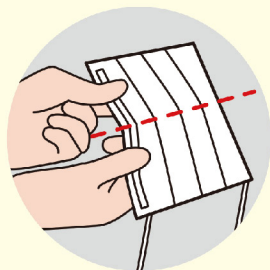

- 2 ゴムを耳にかけて、鼻・ほほ・顎を合わせて、鼻と口を確実に覆います。



- 3 鼻の部分を押しえてフィットさせ、マスクに手を沿わせて隙間を作らないように調整します。



外すとき

ゴムの部分を持って耳から外し、マスクの外側に触らないようにして捨てましょう。

