

腰部固定帯

主な用途：腰のサポート



ランバック® ソフトⅡ



▲商品詳細はこちら

軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力UP

- 軽くてソフトな着け心地
- 通気性のあるメッシュタイプ
- 2本のステーがしっかりサポート




清潔感のあるホワイト



補助ベルト

補助ベルト


汚れが目立ちにくく
スポーティーなブラック

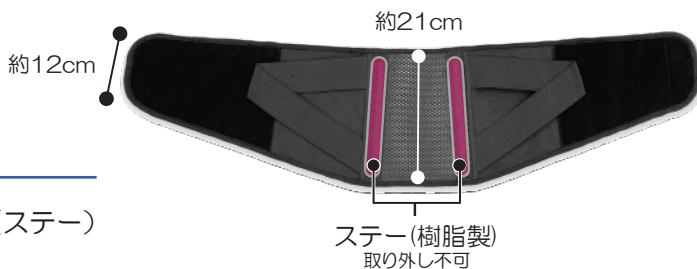

素材


ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン（ステー）

装着方法

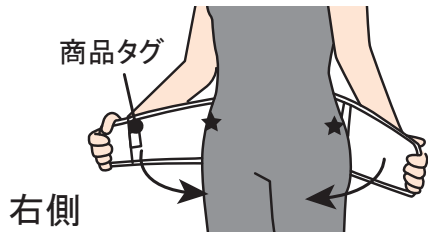

右側


① 本体の両端を持ち、腸骨(★)を覆うように体の正面で留めます。

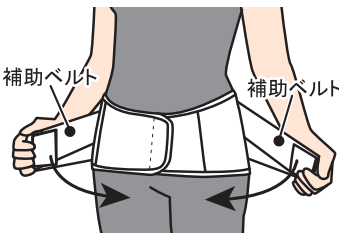

補助ベルト

補助ベルト

② 補助ベルトを引っ張り、下腹部を引き上げるように補助ベルトを留めます。

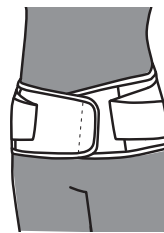


③ ゆるみやズレがないか確かめてください。違和感がある場合は、再度はじめてから装着し直してください。

規格

サイズの選び方

計測部位目安

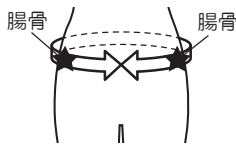

★腸骨(ちょうこつ)
骨盤の出っ張った骨の部分

規格	腰廻り	カラー：ホワイト		カラー：ブラック		定価：オープン	
		商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	販売単位	ケース単位
S	65cm～75cm	034232	4958995342321	034072	4958995340723	1枚	10枚
M	75cm～90cm	034233	4958995342338	034073	4958995340730	1枚	10枚
L	90cm～105cm	034234	4958995342345	034074	4958995340747	1枚	10枚
LL	105cm～120cm	034235	4958995342352	034075	4958995340754	1枚	10枚
3L	120cm～135cm	034236	4958995342369	034076	4958995340761	1枚	10枚

※3Lサイズもご用意しております（包装仕様が異なります）

・1枚入袋



カラーが分かる透明窓

保険対応 処置にあたり腰部固定帯を使用した場合 区分J119-2 腰部又は胸部固定帯固定35点の算定に対して、区分J200 腰部固定帯加算（初回のみ）170点を加算できる。

ランバック® シリーズ

腰廻り (共通)

S 65cm ~ 75cm

M 75cm ~ 90cm

L 90cm ~ 105cm

LL 105cm ~ 120cm

3L 120cm ~ 135cm
※ランバックソフトIIのみ



ハード

ランバック®

弾力性のある**特殊樹脂ステー 4本**
(15cm×4本)



ムレにくい
メッシュタイプ

- 特長** 上下がなく左右どちらからでも装着可能
- 色** ブラック・ホワイト
- 価格** オープン



ソフト

ランバック® ソフトII

追従性のある**特殊樹脂ステー 2本**
(18cm×2本)



軽くて
通気性のある
メッシュタイプ


- 特長** 軽量メッシュで快適
- 色** ブラック・ホワイト
- 価格** オープン



薄手

ランバック® スリム

ウレタンステー 2本

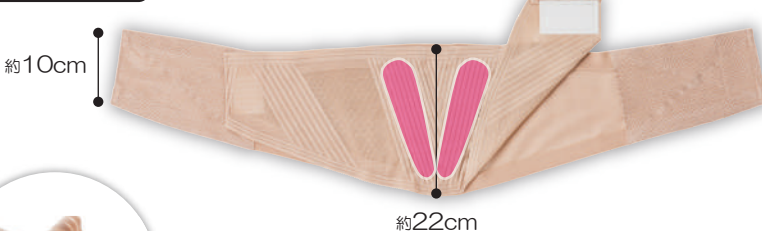

肌着感覚の薄さ

- 特長** 着衣に響かない軽くてしなやかな生地
- 色** ブラック・ベージュ
- 価格** 4,400円(税込) 4,000円(税別)



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤メデア・ビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店