

産前産後腹帯

ソフラグランゼ® マタニティ



Taketora®




▲商品ページ

産前産後のお腹の保護に

- セパレートタイプの留め部分により調整が自在
- 両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット
- 綿主体の素材でソフトな着け心地

安心感のある
厚手生地のため
お腹をしっかり
保護します

立体構造でより
体にフィット

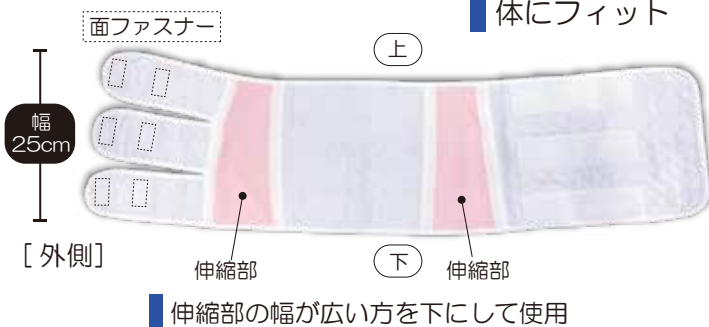


(イメージ：産前)



(イメージ：産後)

装着方法

印字があるほうが肌側です

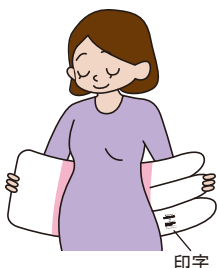

①伸縮部の幅が広い方を下側にしてご使用ください。
(体形によっては上下を逆さにしてもご使用できます。)

印字



②面ファスナーで留めます。
留め部分が3つに分かれているので、ひとつずつ調整してください。




素 材

綿
ポリエステル
ポリウレタン
ナイロン

サイズの選び方

計測部位目安

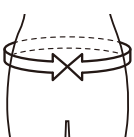

規 格

定価：オープン

商品番号	規格	お腹回り	販売単位	JAN CODE	ケース単位
040833	M	75cm ~ 90cm	1 枚	4958995408331	10 枚
040834	L	90cm ~ 105cm	1 枚	4958995408348	10 枚
040835	LL	105cm ~ 120cm	1 枚	4958995408355	10 枚



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店