

あご脱臼予防用

# ソフラ® あごバンデージ I



小顔な方にも！ **SS** サイズ登場！

日本製  
MADE IN JAPAN



▲商品詳細  
はこちら

あご関節の脱臼予防や施術後に  
あごを気持ちよく固定

- 面ファスナーでしっかり固定  
固定力の微調整が可能
- 綿が主体のやさしい素材
- 一体型3点留めでズレにくい形状



コンパクトなパッケージ  
・取扱説明書同封



定価：4,950円(税込) 4,500円(税抜)

	商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
NEW	007391	ベージュ SS	1枚	4958995073911	10枚
	007392	ベージュ S	1枚	4958995073928	10枚
	007393	ベージュ M	1枚	4958995073935	10枚
	007394	ベージュ L	1枚	4958995073942	10枚
NEW	007401	ピンク SS	1枚	4958995074017	10枚
	007402	ピンク S	1枚	4958995074024	10枚
	007403	ピンク M	1枚	4958995074031	10枚
	007404	ピンク L	1枚	4958995074048	10枚

## 素材

綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

## サイズの選び方

サイズ	首廻り	顔廻り
SS	30cm	55cm~60cm
S	35cm	60cm~65cm
M	37.5cm	65cm~70cm
L	42cm	70cm~75cm

※値がぎりぎりの場合は1サイズ上をおすすめします

### 計測部位目安




## 装着方法




▲商品詳細  
はこちら

1

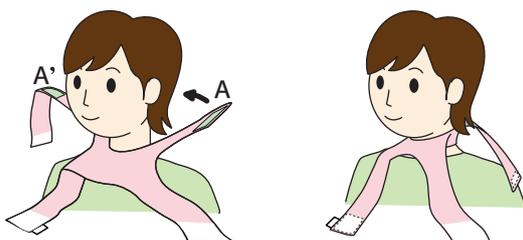


面ファスナー-AとA'の両端を持ち、  
首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。  
(左手側のAが上になります)

2

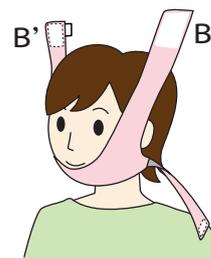


面ファスナー-BとB'の両端を持ち上げ、  
あごにフィットするまで引き上げ、  
頭の上でとめます。  
(左手側のBが上になります)

3

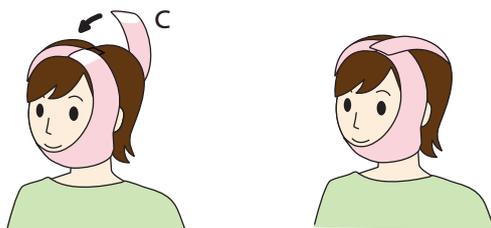

面ファスナー-Cを持ち上げ、  
面ファスナー-BとB'の上でとめれば  
装着完了です。

\*

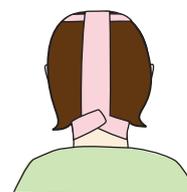

\*後ろから見た図  
固定力を微調整して  
ください。



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

### 【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター 8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店