

ソフラ® あごバンテージI

ワンタッチ顎バンド (1枚入)

顎関節の脱臼時に
顎を気持ちよく固定



着用方法は
こちらから
動画で確認
できます。



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

商品に関するお問い合わせ **0120-701-403**
(月～金 9:00～17:00 ただし祝日を除く)

使用上の注意

- ・ご使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- ・使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相談してください。
- ・強く巻きすぎると血行が悪くなるおそれがありますので、ご注意ください。
- ・面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。
- ・呼吸がしにくい場合がありますので、サイズを適宜確認のうえご使用ください。

サイズ一覧

規格(参考サイズ)	
SS (首廻り 30cm / 顔廻り 55 ~ 60cm)	
S (首廻り 35cm / 顔廻り 60 ~ 65cm)	
M (首廻り 37.5cm / 顔廻り 65 ~ 70cm)	
L (首廻り 42cm / 顔廻り 70 ~ 75cm)	

※値がぎりぎりの場合は1サイズ上をおすすめします

計測部位



主な素材

- ・綿
- ・ナイロン
- ・ポリウレタン
- ・ポリエステル
- 本品を廃棄する場合は、上記素材に関する各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。


洗濯方法

- ・面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。
- ・水の温度は40℃を限度とし、手洗いをしてください。(洗濯機のご使用は避けてください。)
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。漂白剤による漂白はできません。
- ・タンブラー乾燥は製品変形、劣化のもとになりますのでおやめください。
- ・日陰でつり干しをしてください。
- ・アイロン、ドライクリーニングは避けてください。

着用方法




1

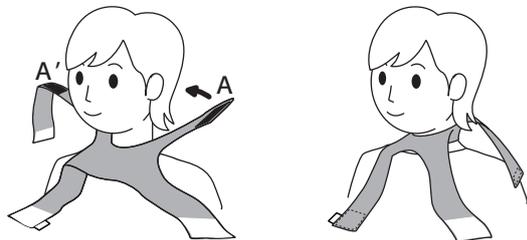


1. 面ファスナー-AとA'の両端を持ち、首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。(左手側のAが上になります)

2

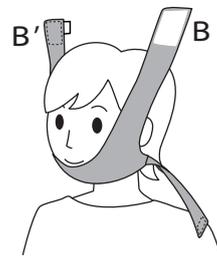


2. 面ファスナー-BとB'の両端を持ち上げ、あごにフィットするまで引き上げ、頭の上でとめます。(左手側のBが上になります)

3

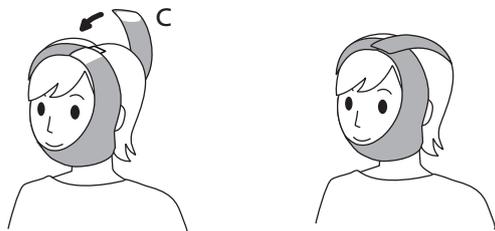

3. 面ファスナー-Cを持ち上げ、面ファスナー-BとB'の上でとめれば装着完了です。

*

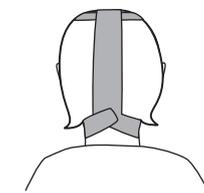

*後ろから見た図
固定力を微調整してください。