

足関節固定バンド

NEW

ソフラウルファー® エイト



足首の安定した圧迫固定に

- フィギュアエイトの効果を活用
- 適度な伸縮性で足首をしっかり固定
重心がブレにくい
- 面ファスナー接着で着脱簡単、左右兼用



6cm 幅：SS・S・
ピンク(全規格)
8cm 幅：M・L・LL・3L


フィギュアエイト：足首の安定を高める巻き方



土踏まずが上がり
アーチの崩れを防ぐ

【アーチの役割】

- ① 体重を支える
- ② スムースな歩行をサポート
- ③ 歩行時の衝撃を吸収

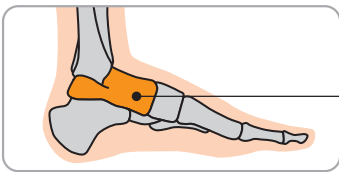


距骨の動揺を制限し
足首をしっかり固定

距骨(きょこつ)
全体重がかかる重要な骨
体のバランスを保ち、
足首を滑らかに動かす役割

装着方法


例) 右足

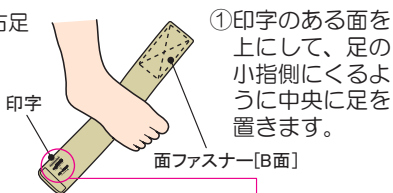

① 印字のある面を上にして、足の小指側にくるように中央に足を置きます。



② バンドを伸ばしながら、足関節を「8の字状」に巻き込みます。内側(土踏まず側)のバンドを下にして足の甲の真ん中で交差するようにしてください。

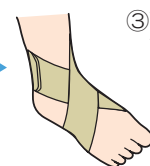

③ 面ファスナー[A面]が面ファスナー[B面]からはみ出ないように接着してください。

本体

(肌側)



(外側)



長さ



- 幅：SS・S・
ピンク(全規格) / 6cm
M ~ 3L / 8cm
- 長さ：SS / 35cm
S / 40cm
M / 45cm
L / 50cm
LL / 55cm
3L / 60cm

素材

本体：ポリエステル
ナイロン
レーヨン
ポリウレタン

カラーが分かる透明窓

1枚入



規格

定価:1,540円(税込) 1,400円(税別)

サイズ	参考足サイズ	カラー：ピンク		カラー：ネイビー		カラー：ベージュ		カラー：ブラック		販売単位
		商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	商品番号	JAN CODE	
SS	20.0 ~ 22.0cm	038051	4958995380514	038061	4958995380613	038071	4958995380712	038081	4958995380811	1枚
S	22.0 ~ 24.0cm	038052	4958995380521	038062	4958995380620	038072	4958995380729	038082	4958995380828	1枚
M	23.0 ~ 25.0cm	038053	4958995380538	038063	4958995380637	038073	4958995380736	038083	4958995380835	1枚
L	24.0 ~ 26.0cm	038054	4958995380545	038064	4958995380644	038074	4958995380743	038084	4958995380842	1枚
LL	25.0 ~ 27.0cm			038065	4958995380651	038075	4958995380750	038085	4958995380859	1枚
3L	27.0 ~ 29.0cm			038066	4958995380668	038076	4958995380767	038086	4958995380866	1枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位(6枚入)です

「ソフラウルファー®」リニューアルのご案内

竹虎の足関節固定バンド「ソフラウルファー®」は、「ソフラウルファー® エイト」に生まれ変わりました。

リニューアル1 カラー

人気の**ブラック**新登場！

2024年3月
リニューアル

従来と同じカラー

NEW 4色



ピンク

ネイビー

ベージュ



2024年1月発売

新登場

ブラック

リニューアル2 サイズ

わかりやすいサイズ表記

※L サイズの方は従来と同じです

従来 商品名：ソフラウルファー®

NEW 商品名：ソフラウルファー® エイト

サイズ	バンド寸法	バンド寸法 (ピンク)	参考足サイズ
S	6cm×35cm	6cm×35cm	～ 22.0cm
M	6cm×40cm	6cm×40cm	22.0～ 24.0cm
MX	8cm×45cm	6cm×45cm	23.0～ 25.0cm
L	8cm×50cm	6cm×50cm	24.0～ 26.0cm
LX	8cm×55cm	—	25.0～ 27.0cm
LL	8cm×60cm	—	27.0cm～



サイズ	バンド寸法	バンド寸法 (ピンク)	参考足サイズ
SS	6cm×35cm	6cm×35cm	20.0～ 22.0cm
S	6cm×40cm	6cm×40cm	22.0～ 24.0cm
M	8cm×45cm	6cm×45cm	23.0～ 25.0cm
L	8cm×50cm	6cm×50cm	24.0～ 26.0cm
LL	8cm×55cm	—	25.0～ 27.0cm
3L	8cm×60cm	—	27.0～ 29.0cm

リニューアル3 パッケージ

【1枚入】
箱→袋
【ケース入数】
6枚入(変更なし)

従来



6枚入

NEW



6枚入



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 藤メディア・ビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店