

ワンタッチ顎バンド

ソフラ® あごバンデージⅢ



Taketora®



▲商品詳細
はこちら

あごの術後をやさしく守る
術後の圧迫固定に

- 肌ざわりのよいやさしい生地
- 面ファスナーで調整が自在
- 2点留めでかんたん装着

面ファスナー2点留め

②

①

グレー

伸縮性のある生地で
頬の固定がしやすい

(肌側)

耳にかからないように
大きく開けたデザイン

あごにかかりやすいように
立体的に縫製

縫い目を外側にし肌への負担を軽減

規 格

定価：5,280 円（税込） 4,800 円（税抜）

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
007413	グレー M	1 枚	4958995074130	10 枚
007414	グレー L	1 枚	4958995074147	10 枚

コンパクトなパッケージ
・取扱説明書同梱



素材

複合繊維（ポリエステル） 66%・ポリエステル34%



一部植物由来の原料を使用したやわらかなポリエステル繊維

サイズの選び方


サイズ	顔廻り	首廻り
M	56cm～67cm	30cm～40cm
L	62cm～76cm	35cm～45cm



装着方法

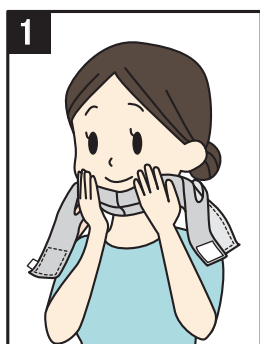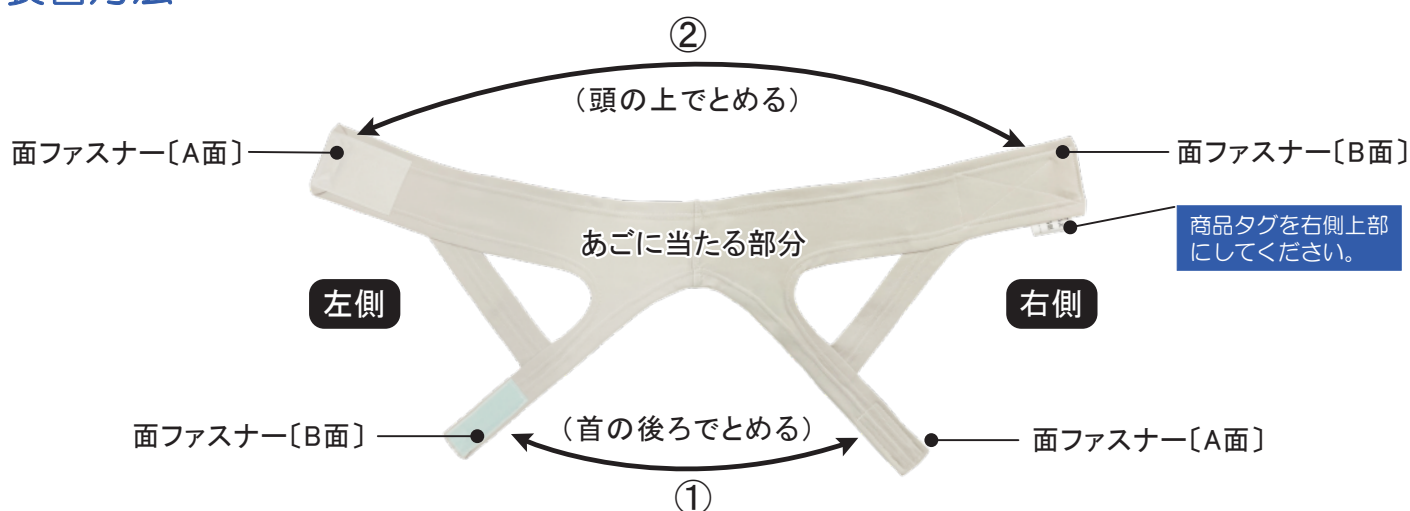


あごに当たる部分をあごに当て、装着位置を確認します。

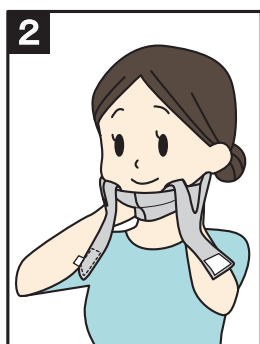

①の面ファスナーの両端を持ち、首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。（左手側の面ファスナーB面が上になります）



②の面ファスナーの両端を持ち、あごにフィットするように頭の上でとめます。（左手側の面ファスナーA面が上になります）

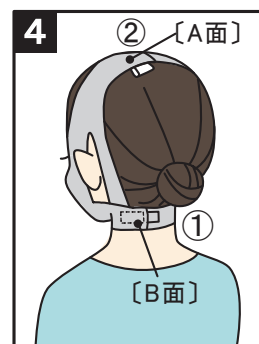

* 後ろから見た図
固定力を微調整してください。



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店