

歯科用ディスポーザブル（使い捨て）フェイスタオル

# 三角穴フェイスガードⅡ



Taketora®




▲商品ページ

日本製  
MADE IN JAPAN

タオルから使い捨てタオルへ。衛生的&感染対策

## 【使用用途】

- スケーリング・エアフロー時などの水しぶきによる顔・頭髮・首元への飛沫防止
- 外来診療での抜歯時のドレープとして
- 切削片などからの目の保護として

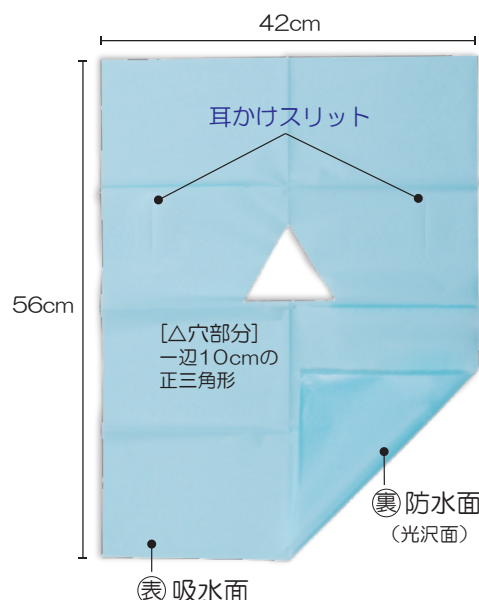

表面/吸水、裏面/防水

顔が暑い場合は、吸水面を顔側にして掛けると解消（水分の伝い落ちにご注意ください）

耳かけスリット




お互いの顔の様子がわかりつつも視線が合わない透け具合。顔が見える安心感と直視しない事で患者さんの緊張緩和の両方を実現

## 三角フェイスガードⅡをズレにくくする3つの工夫


### ①スリットを耳に掛ける方法

スリットの両端を耳に合わせて広げる

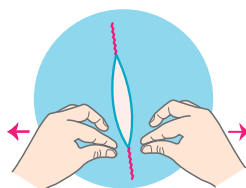


### ②穴を大きくする方法

三角穴頂点を鼻の形状に合わせて広げる

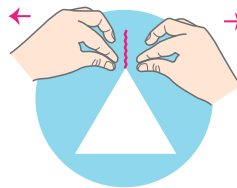

### ③あごに引っ掛ける方法

三角穴底辺両端を下あごの形状に合わせて広げる

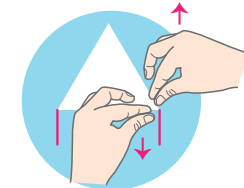

※つまんで引っ張り広げる

## 素 材

クレープ紙・ポリエチレン

## 規 格

4,400 円（税込） 4,000 円（税別）

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
007161	ブルー 42cm×56cm 200 枚入	1 箱	4958995071610	8 箱



200 枚入



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

## 【メディカル事業部】

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店