

肘用サポーター

エルボーギア® サポーター



Taketora®

ギプス除去後の不安を軽減
ありそうでなかった肘用サポーター



こんな時に



ギプス除去後の
肘の保護



日常生活動作
の不安




リハビリ開始時
のサポート




肘に違和感が
ある方

日常生活動作のサポートに

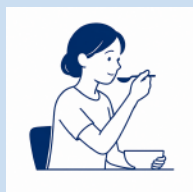


食事

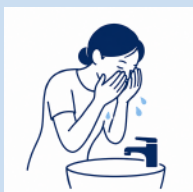

洗顔



着替え

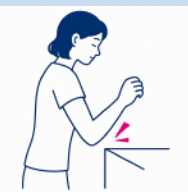

ぶつけそうな時

片手で簡単装着

面ファスナーで
自由に調整

左右
兼用

動きやすさを保ちながら、肘を守る

特長 ① 肘関節をしっかりサポート

- 2本のスTEEで屈曲の可動域を適度に制限。



樹脂スTEE

- 上下ベルトによる圧迫で、靱帯や腱の動きを適度に制限。

特長 ② 動きやすさと両立


- 曲げ伸ばしは妨げず必要な動きを確保。日常生活を快適にサポート。



- 動きの多い肘部分はオープン設計。

特長 ③ 肘にしっかりフィット

- 肘の形状に合わせた立体形状。

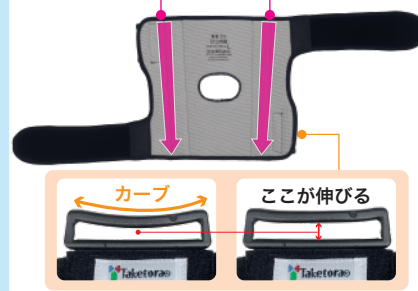

- ベルトのテンションに応じて角カンが伸縮し、腕へのフィット感を高める。

●装着方法 ※本品は左右兼用です。

1 製品の上下、表裏を確かめてください。

ベルトが角カンを通っていない場合は、あらかじめ角カンに通してください。ロゴのついている方を表にして腕を通します。

2 楕円の穴が肘の内側になるように装着してください。

肘内側中心

穴の位置を肘内側の中心にあわせます。

3 上部ベルト・下部ベルトの固定力を調節します。

ベルトを適度な力でひっぱり、面ファスナーで固定します。

4 装着状態を確認してください。

※楕円の穴が肘の内側にきているかご確認ください。

穴がしっかり肘内側の中心に位置するように、調整してください。

必要な可動域を確保しながら、過度な肘の動きを制限。リハビリや日常生活を安心して過ごせます。

過度な屈曲・伸展
(曲げすぎ・反りすぎ)

ステーが肘の動きをサポート。曲げすぎ・反りすぎを抑えます

回内・回外
(ねじれの動き)

ステーと上下ベルトがねじれをサポート。過度な回旋を抑えます

内反・外反
(横方向の動き)

ステーが肘の両端を支え横方向のブレを抑えます



【正しい装着】



【誤った装着】



●素材：(本 体) ナイロン
ポリエステル
ポリウレタン
(ステー) ポリエチレン
(角カン) ナイロン

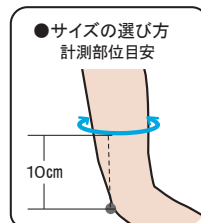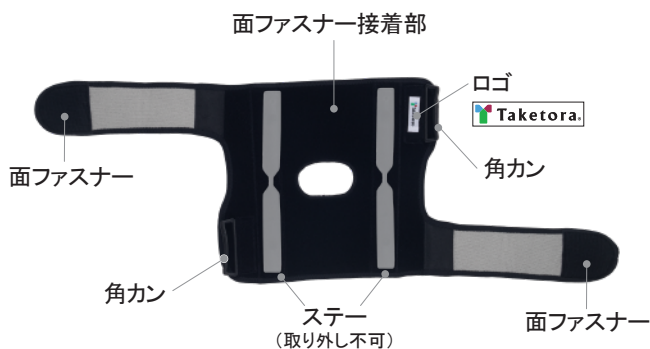

2,310 円 (税込) 2,100 円 (税別)

商品番号	規 格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
037623	M 肘上廻り 21cm ~ 25cm	1 枚	4958995376234	5 枚
037624	L 肘上廻り 25cm ~ 31cm	1 枚	4958995376241	5 枚

※この商品のメーカー出荷はケース単位です



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 2-23 電話メディアビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店